




Node Seeker 2000 & Gamma Probe Instruktioner til brug


1. **Tænd for den trådløse probe** ved at trykke på knappen ved probens spids. En grøn LED-lampe på proben skal tænde (placeret lige over IMI-logoet og serienummeret). Hvis ikke, skift batteriet i proben. For at tage batteriet ud, skal du åbne bagsiden af proben ved at skrue den grå hætte af. Udskift batteriet med den negative side mod fjederen.
2. **Tænd Node Seeker** ved at holde inde på tænd/sluk-knappen på siden. Giv Node Seeker-computeren et par minutter til at starte op. Tryk på ikonet "Gamma Probe Serial Number" for at starte hovedprogrammet. Den grønne LED skal nu begynde at blinke med en højere hastighed.
3. **For at sikre, at tæller registreres**, skal du pege på den trådløse gammaprobe mod en radioaktiv kilde.
4. **For at slukke for Node Seeker**, vælg den røde "shutdown" og vælg derefter "yes" fra berøringsskærmen.
5. **Sluk for den trådløse probe** ved igen at trykke på knappen på bagsiden af proben. Den grønne LED-lampe skal stoppe med at blinke. Det anbefales at probe-batteriet ændres før hver brug (eller i begyndelsen af hver dag).

Afbryderknop

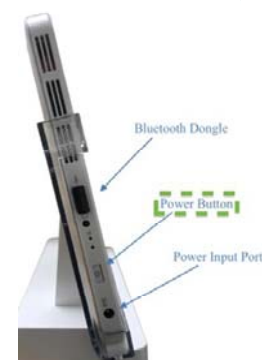

Yderligere indstillinger

- **Lydstyrken øges eller formindskes** ved at vælge   på skærmen
- Det menneskelige øre må ikke skelne lyden til 50 tællinger pr. Sekund fra lyden til 80 tællinger pr. Sekund. Hvis dette er tilfældet, tryk på knappen.
- Hvis dette er tilfældet, tryk på knappen **x1** for at skifte til **x10**
 - Dette ændrer forholdet mellem lydfrekvensen og tællefrekvensen.

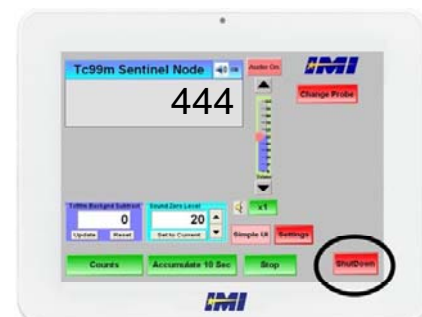

- **Accumulate 10 Sec** Display tæller akkumuleret over 10 sekunder. Den foregående tælling vises, indtil 10 sekunders akkumulering er færdig. En nedtælling vil fremgå over tællerne. For at vende tilbage til almindelige tællinger, klik på knappen "Counts".
- **Sådan ændres detektionslyden.** Tryk på 'Settings'. Vælg "Tc99m Sound Configuration". Brug rullemenuen til at vælge lyde, og klik derefter på 'Save' og 'OK'. Når du er færdig, klik på "Close" for at vende tilbage til tællermenue.
- Knappen **Simple UI** fjerner I-125 tællinger fra tæller skærmen.
- Knappen **Audio On** kan straks slå alle lyde fra.