


## Brugsanvisning



### Trin 1

Forbind applikatoren (med skumpåføring eller fin spids) til røret ved at holde krympningen på røret mellem tommel- og pegefinger i den ene hånd og applikatorens spids i den anden hånd. Mens applikatoren holdes stille, drejes og skrues røret ind i applikatoren, indtil røret punkteres, hvilket vil gøre det muligt at sprede adhæsivet. Peg spidsen i retning væk fra patienten for at undgå enhver utilsigtet påføring af **derma+flex<sup>®</sup> gel-adhæsiv (derma+flex<sup>®</sup>)** på såret eller på patienten.

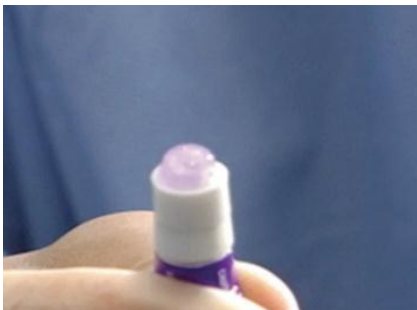

### Trin 2

Mens der holdes på røret, og med applikatorens spids peget opad og væk fra patienten, trykkes røret forsigtigt, så der lige nøjagtigt trykkes nok **derma+flex<sup>®</sup>** ud til at gennemvæde skumspidsen. Lad adhæsivet synke ned i skummet. Hvis applikatoren med den fine spids anvendes, trykkes forsigtigt på røret, indtil adhæsivet kan ses ved spidsen. Herved fås en mere kontrolleret påføring.



### Trin 3

**PÅFØR KUN ET (1) LAG!** Ved påføring approksimerer man sårets kanter og "pensler uden at trykke" tilstrækkeligt med **derma+flex<sup>®</sup>** til at dække sårområdet. Lad ikke adhæsivet ligge i "klumper" eller "søer", da dette vil gøre tørretiden længere. Hvis du kan registrere den lilla pigmentering fra **derma+flex<sup>®</sup>** på huden, er der påført for meget, og det vil være længere tid om at tørre. I tilfælde af for meget påføring af **derma+flex<sup>®</sup>** skal det overskydende blot fordeles på området omkring såret vha. applikatorens spids, indtil den lilla farve forsvinder. Ved korrekt påføring vil limen se skinnende, ensartet og farveløs ud. **PÅFØR IKKE MERE END ET LAG derma+flex<sup>®</sup>, DA DETTE VIL PÅVIRKE TØRRETIDEN NEGATIVT.**



### Trin 4

Efter påføring af ET lag **derma+flex<sup>®</sup>**, fortsættes den manuelle approksimering af sårets kanter i ca. 60 sekunder. Det kan tage OP TIL tre (3) minutter for hele adhæsivlaget at hærde helt og forme en ikke-klæbende, tør overflade. Hvis der er påført for meget adhæsiv (se trin 3 ovenfor), eller der er blevet påført flere lag, kan tørretiden overstige 3 minutter.