



### Anvendelse og rengøring

Cervix bør være mindst 3 cm. åben og hinderne bristede, for at gøre prøvetagningen mulig.

- Ved dorsal og kun let åben cervix kan der anvendes Roux-hager til at trække cervix fremad. Moderen ligger bedst i venstre sideleje.

Amnioskopet indføres og presses let mod fosterets hoved. Lyslederen fastsættes på amnioskopet.

Ydersiden af skalpen rentørres grundigt. Tørring og gnidning forbedrer udbyttet af prøvetagningen.

Hemo-Formsalve påføres på incisionsstedet.

Snittet laves ved at støde skalpellen mod skalpen. Et anvendeligt snit fås, hvis skalpellen forsigtigt drejes mod højre/venstre for at udvide snittet.

Blodet opsamles med hepariniserede kapillærrør, som sættes fast i den ene ende på et kapillærrørhåndtag.

Incisionsstedet på fosterets skalp komprimeres med en tør klud i 1-2 min. Kontroller, at blødningen er ophørt.