




## Quick-Guide GUBBINI Midi resektoskop

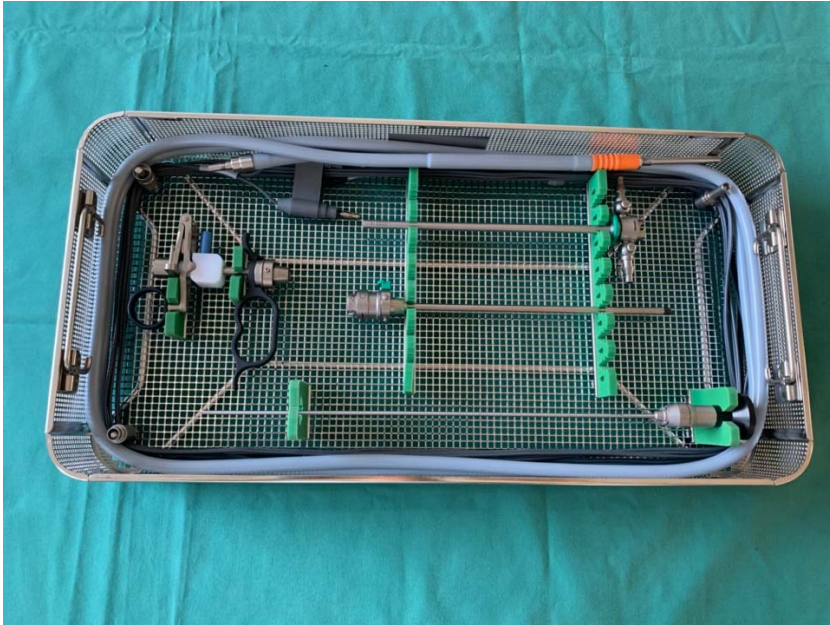



1. Ydre rør
  2. Indre rør
  3. Optik inkl. adapter  
3 a. Adapter
  4. Slynge/ball
  5. Arbejdselement
  6. Lyskabel inkl. adapter  
6 a. Adapter  
6 b. Adapter
  7. Bipolært kabel
8. Start med at sætte adapter 6 a. og 6 b. på lyskablet og 3 a. på optikken

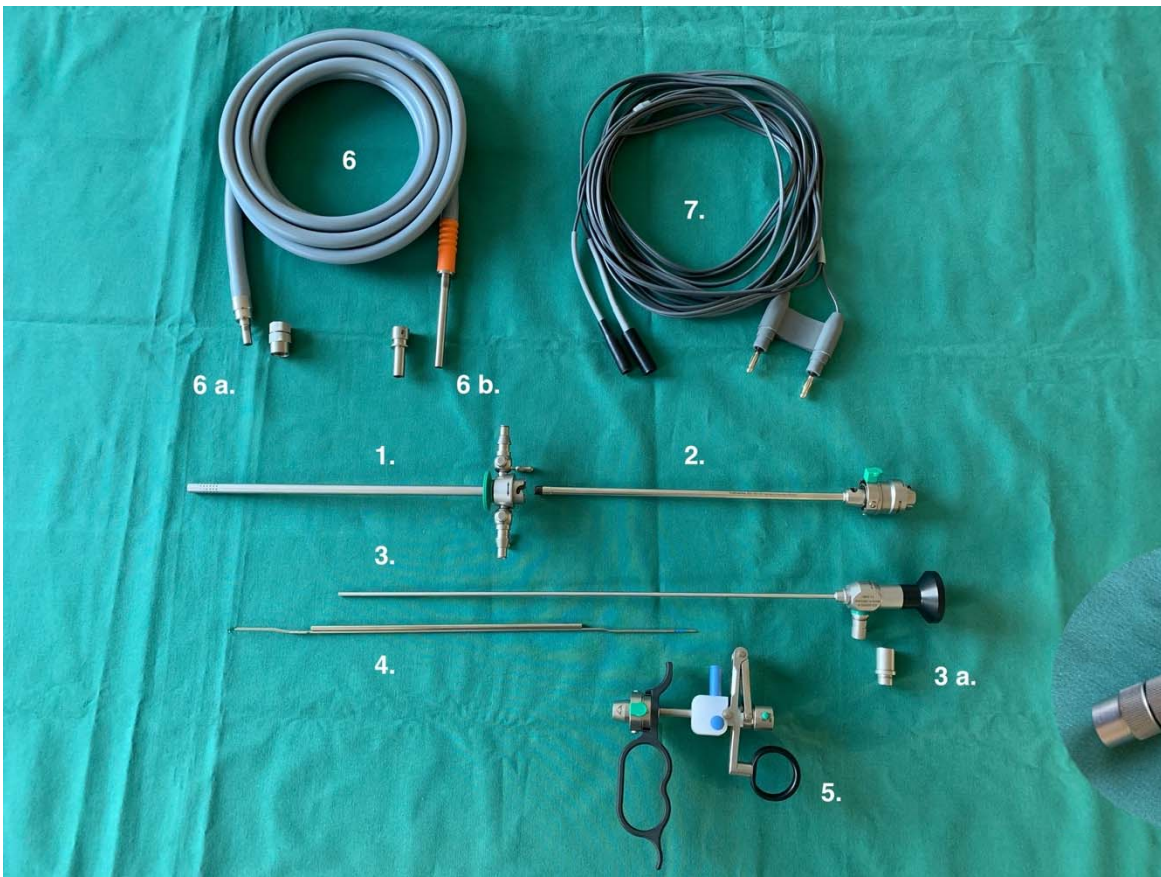


**OBS** vend den rillede side af adapteren ind mod lyskablet

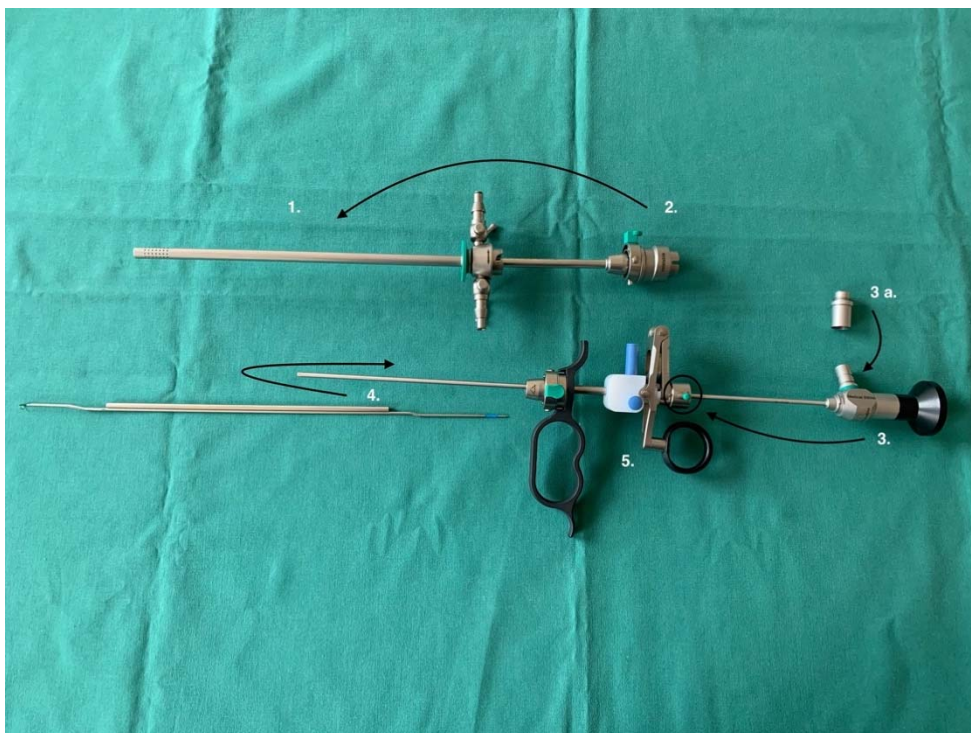


9. Sørg for at adapter (3 a.) sidder på optikken (3)
10. Ydre rør (1) og indre rør (2) samles
11. Indfør optikken (3) i arbejds-elementet (5) og lås optikken fast med det lille håndtag på arbejds-elementet (5)
12. Sæt derefter slyngen (4) på optikken (3)
13. Slyngen (4) skal ramme det nederste hul i arbejds-elementet (5) under optikken (3) hvorefter du vil høre et klik

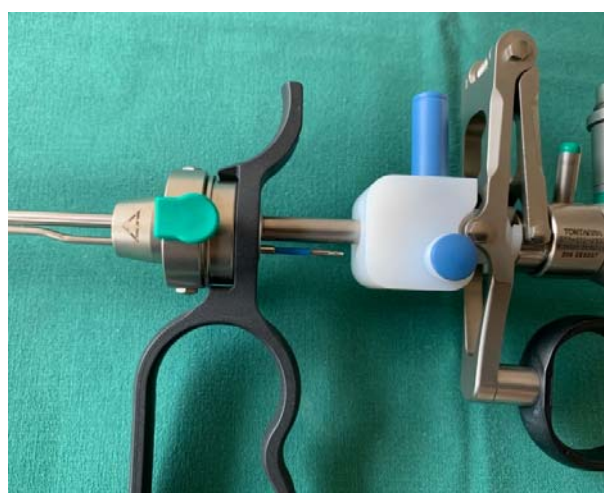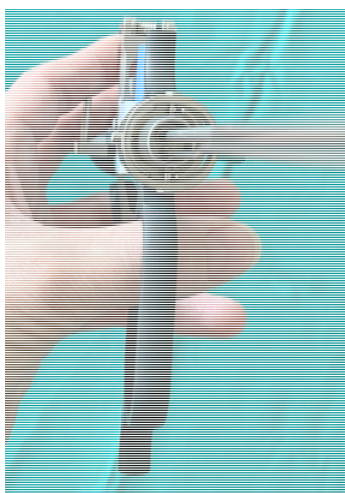

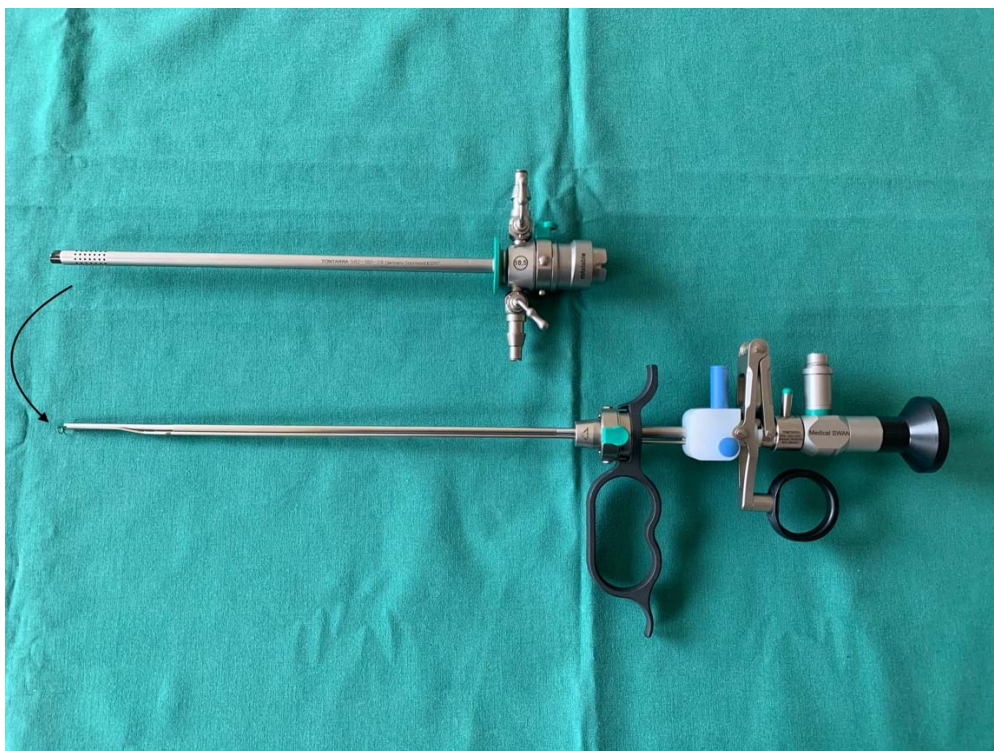

14. Det samlede ydre og indre rør, sættes sammen med arbejds-elementet (med optik og slynge)

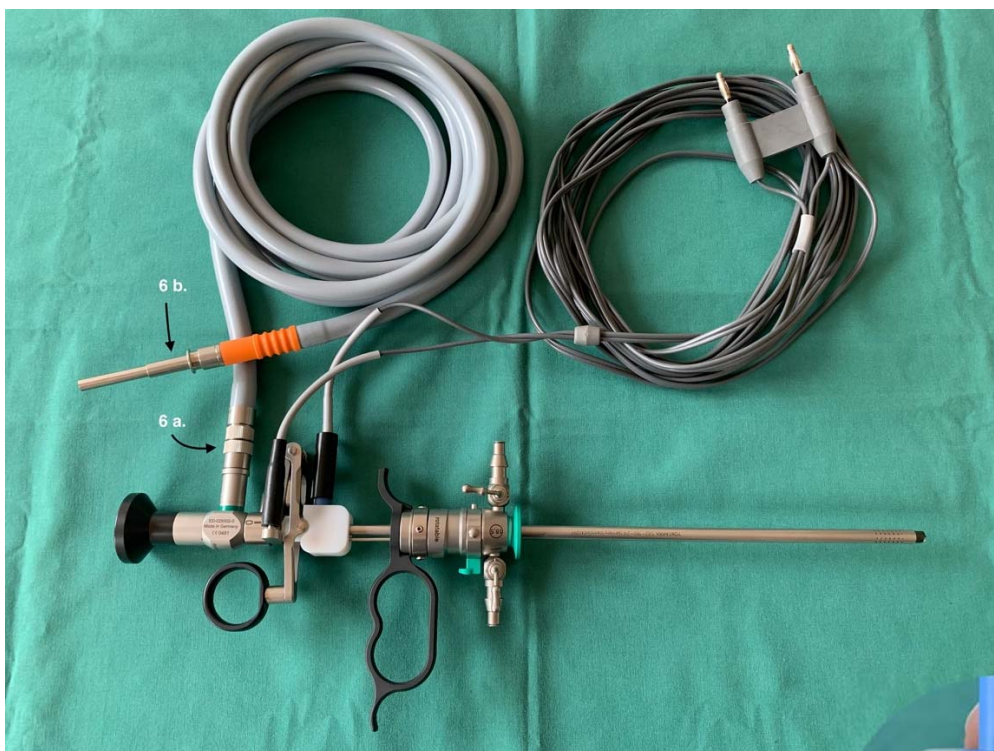

15. Sørg for at adapter 6 a. og 6 b. sidder på lyskablet  
16. Tilslut lyskabel  
17. Tilslut bipolært kabel til jeres el-kir. enhed (indstilles på saltvandsprogram)  
18. Tilslut kamera og hvidbalancere  
19. In/out flow slanger tilsluttes

**GUBBINI er nu klar til brug**

Efter brug fjernes engangs eller flergangsslyngen ved at trykke på den blå knap

