


Brugsanvisning af Cetro Visir



Plastvisir med holder.

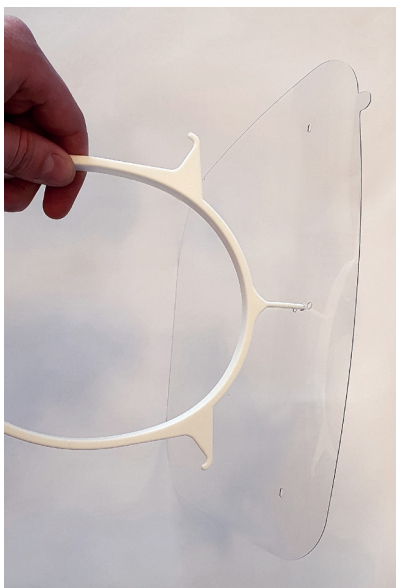

Placer holder i midterste hul på visir. Bemærk, at der er 3 huller til at justere vinkel.



Fastgør holderen til piggene i hver side.



Sæt Cetro Visir på hovedet. Hvis holderen sidder løst, kan der anvendes en elastik i de bagerst kroge for at regulere størrelsen.



Kontroller at Cetro Visir sidder korrekt, inden arbejdet påbegyndes.

Tilsigtet brug

Produktet er tilsigtet til brug for prøvetagning og arbejde med patienter/brugere i sundhedsplejen og på sygehuse.

CE mærkning

Produktet er CE mærket efter PPE direktivet (EU) 2016/425, Risiko kategori 1.

REF.: 2019



40-2019-001-200326