

Brugsanvisning prolapsring



Indikation:

- Silikoneret med eller uden membran, ved første og anden grad af livmoderprolaps.

Kontraindikation:

- Ringen bør ikke indsættes i tilfælde af infektion i bækken eller beskadigelse i det bløde væv i vagina.
- Ej heller hos patienter, som ikke er i stand til at medvirke selv.
- Endometriosis kan være en grund til at livmoder ringen ikke kan anvendes.
- Ved graviditet afgøres indikationen fra sag til sag.

Før indsættelse:

- Blæren skal tømmes før indsættelse
- Korrekt størrelse på ringen afgøres ved at prøve sig frem.
- Der kan være behov for flere konsultationer for at finde den rigtige størrelse.
- Det andet besøg skal helst finde sted indenfor 30 dage, for opfølgning af symptom reduktion og evt. sår i skeden.
- Ved kontrolbesøg skal ringen tages ud og skeden undersøges.
- Patienten skal forstå vigtigheden af regelbunden kontrol.

Vejledning afprøvning og indsættelse

- Udfør en normal gynækologisk undersøgelse af bækken og skede inden afprøvning.
- Brug fingrene for at estimere den rette størrelse ring

REF: 9613

STERILE R

REF: 9614

CE0413



- Brug tørre handsker. Det er kun den forreste del af ringen der skal smøres.
- Fold ringen i den uddybning der ses på ringens inderside (Fig. 1 og 2).
- Ringen indføres som vist i Fig. 3 og åbnes ved fornix bagside.
- Med pegefingeren drejes ringen en ¼ omdang, hvilket forhindrer ringen i at folde sig sammen og falde ud.
- Bed patienten om at stå, sidde og bukke sig let fremover.
- En korrekt placeret ring skal ikke kunne føles.
- Ringen må ikke sidde for løst, ej heller for stramt. Der bør være plads til en finger mellem ringen og vaginalvæggen.
- Mellemlummet mellem ringen og vaginalvæggen må ikke være for stort. Dette kan medføre at ringen mister sin position eller eventuelt falder ud.
- Forudsæt ikke, at størrelsen er den samme, ved udskiftning til en ny ring.
- Livmoder ringen er et engangsprodukt. Genbrug af ringen kan forårsage infektion.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

