




Træk navleklemmen på peanen. Med en anden pean klemmer du sammen om navlestrengen tæt på Moderen

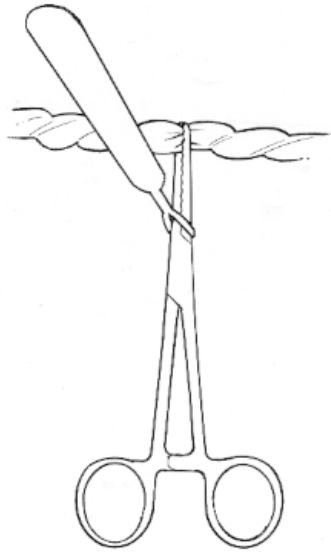


Klem sammen om navlestrengen tæt på barnet med peanen med navleklemmen på. Sørg for, at spidsen på peanen placeres kant til kant med navlestrengen.

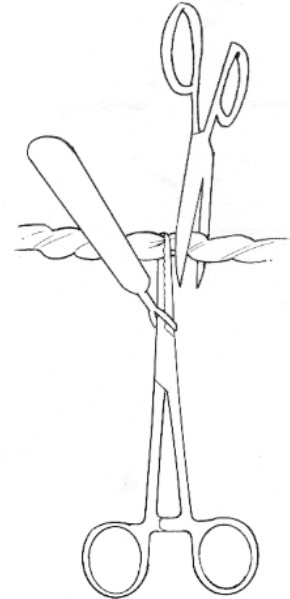

Klip navlestrengen over på moderens side tæt på peanen med navleklemmen.

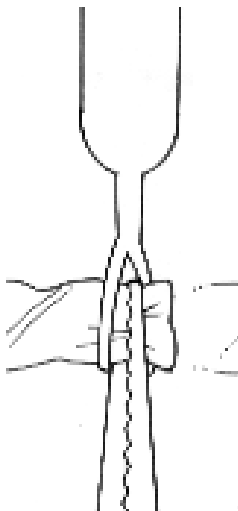

Tag godt fat i navleklemmens håndtag og træk navleklemmen af peanen og ud over navlestrengen.

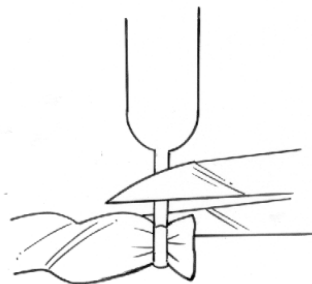

Klip navleklemmens håndtag af tæt på navleklemmens ring, som nu sidder rundt om navlestrengen.



Klar

Varenr.: CE 9607
Varenr.: Ce 9607-S

Navlesnor 300/bx
Navlesnor latexfri 300/bx