

## Montering af RUMI II til TLH



Det sterilt pakkede håndtag pakkes ud

Medbring på stuen forskellige størrelser af engangsprodukter til Rumi II.

**Spidser** til intrauterin placering: Findes i forskellige diametre og længder. Operatøren måler/vurderer diameter og længde i forbindelse med dilatering af cervicalkanalen.

**Kopper** til at holde "lufttæt" vaginalt: Findes i forskellige diametre til cervix. Operatør måler/vurderer størrelse



Engangs spidsen monteres på "pinden" af Rumi II ved at "skrue" 180° med uret på gevindet. Der skal et godt "tryk" til samtidig med at man drejer.




4




5

Slanger fra spids (Transparent til kontrast og hvid til saltvand til ballon i uterus) trykkes ind i de falsede riller på siderne af manipulatorens. Bemærk håndtag drejes i yderposition, når slangerne trykkes ind i falsen

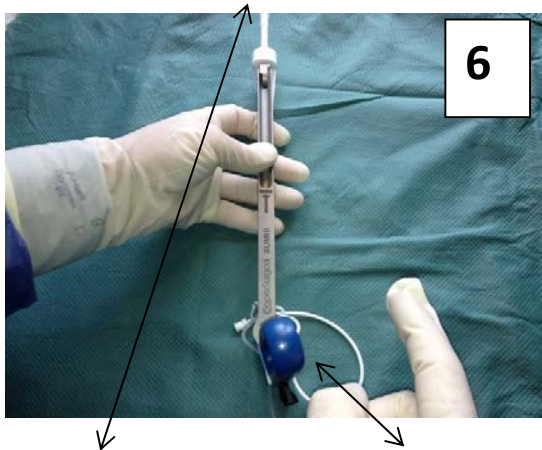


6

Drej håndtaget ganske let til højre, så spidsen er lige – det letter monteringen af koppen

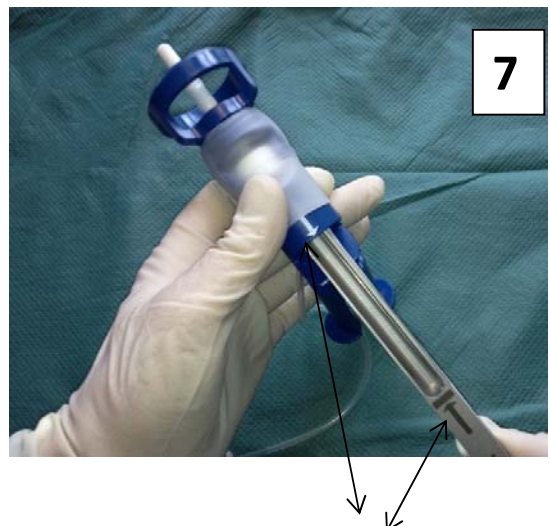

7

Monter koppen over spidsen. Pil på kop mod pil på Rumi II

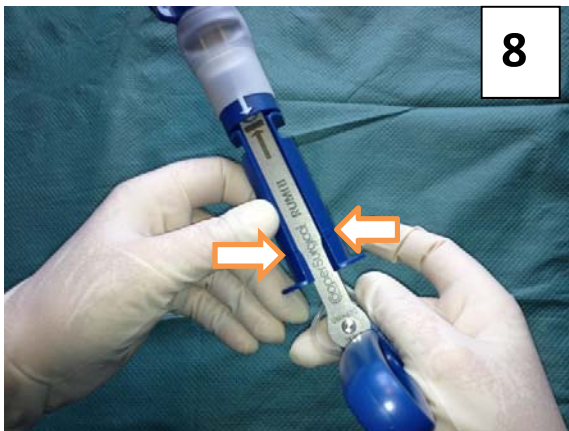


8

Monter den bevægelige del af koppen over Rumiskinnen, så de med pil viste "flapper" er over skinnen. Koppen skal let kunne skubbes frem og tilbage på skinnen. Træk den langt tilbage mod håndtaget.



9

**Test** ballon til spidsen gennem hvid slange med 3-5 ml saltvand ( 10 ml går an – men langsomt.....) Denne mængde bruges også intrauterint. Fjern saltvandet igen fra ballonen.

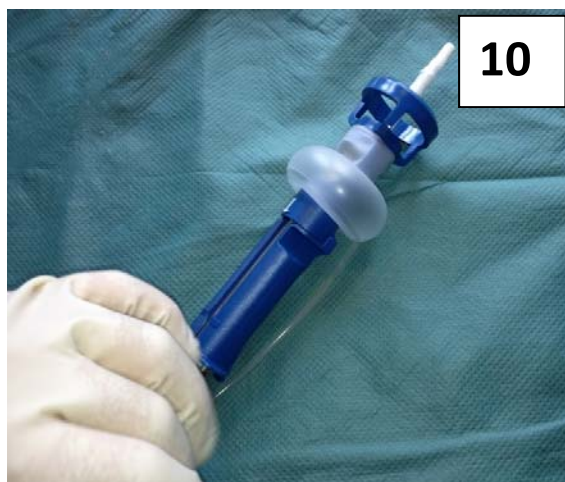

10


**Test** ballon til koppen med 60-120ml saltvand. Denne mængde bruges også intravaginalt. Fjern saltvandet igen fra ballonen

Rumi II er klar til brug

OPERATØR:

11

Rumispidsen indføres nu intrauterint efter dilatering ( Hegar ) og ballon fyldes med 3-5ml ( 10ml er prøvet) saltvand. Når uterus skal frigøres på kopkanten , fyldes ballon på kop med 60-120ml saltvand

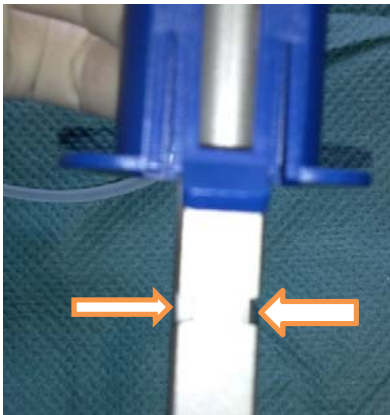


12



Bagpå Rumi II ses 2 hak i skinnen, hvor koppen skal fikseres, når den skubbes på plads omkring cervix. Dette kan ses på Rumi II under placering, hvor pil på koppen møder pil på Rumiskinnen – evt. kan "klik" høres /mærkes.

#### Demontering efter brug:

1. Fjern saltvand fra ballon på kop og spids
2. Frigør bevægelig del af kop

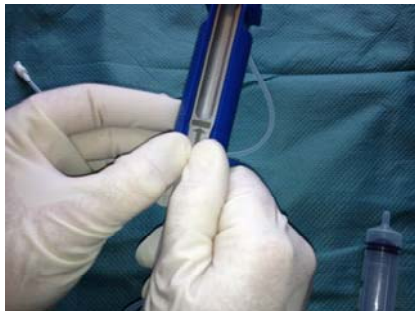

og skub koppen udover spidsen med håndtag fikseret let til højre, så spidsen er i forlængelse af Rumiskinnen (lige)

3. Løsgør spidsens slanger og skru spidsen 180° mod uret.
4. Placer Rumi i vand eller aftør med fugtig serviet