



## Rengøring af RUMI- uterusmanipulator.

1. Afmonter blå/hvid engangs cup/vaginal ballon fra instrumentet.
2. Fjern farvet engangsspids fra instrumentet.
3. Aftør instrumentet med fugtig klud/børste og fjern synligt blod og væv.
4. Spul lille kanal i spidsen af manipulatoren igennem med lunt vand.
5. Placer evt. instrumentet i ultralydsbad.
6. Placer i vaskemaskine. Vaskes på program for instrumenter.
7. Efter tørring pakkes den til sterilisation.



Instrumentet tåler autoklavering/strålesterilisation ved 134 grader C.



Spørgsmål stilles til APGAR A/STif