



Vaskevejledning

**** Hans Clip(polymer clip) Endo Clipsetang ****


1. Åben silikoneprop på vandporten

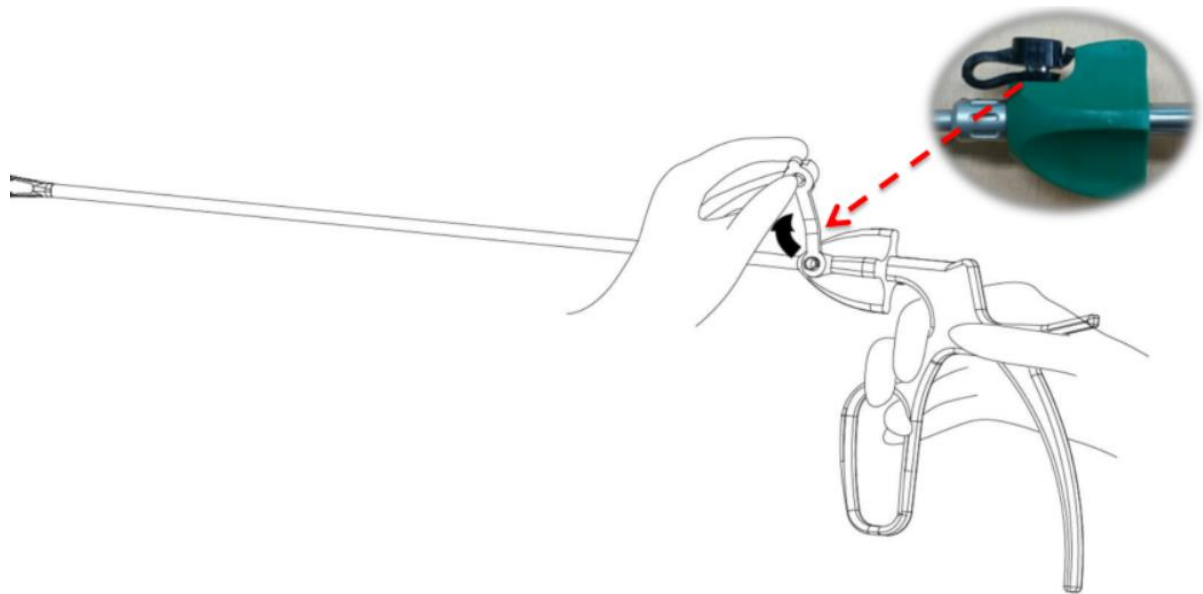

2. Sprøjt varmt destilleret vand eller RO vand i porten.
Skyl igennem i ca. 2 minutter eller til vandet er klart.

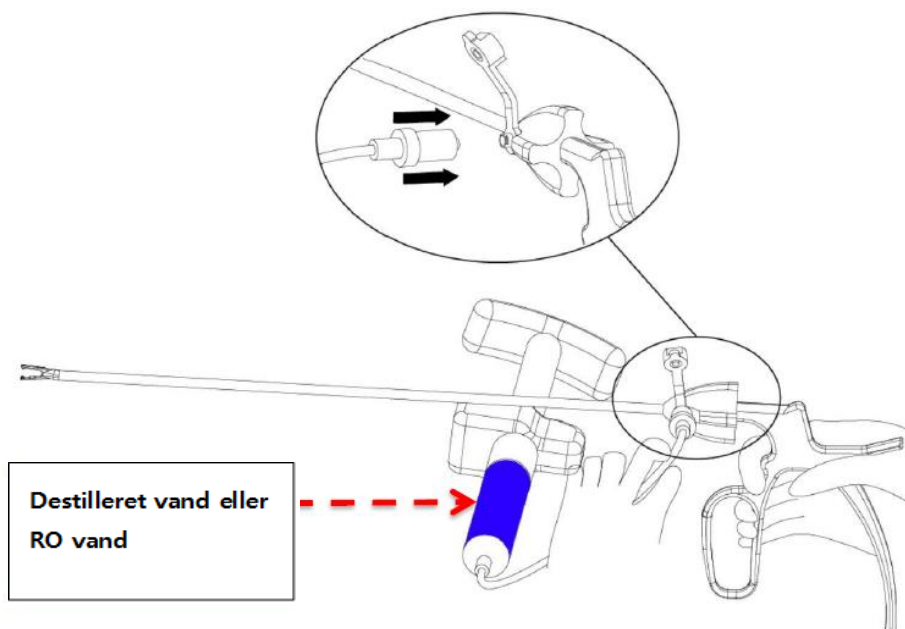

3. Rengør indersiden af rør og clipsehoved ved at skylle til der kommer klart vand ud gennem selve clipsehovedet.

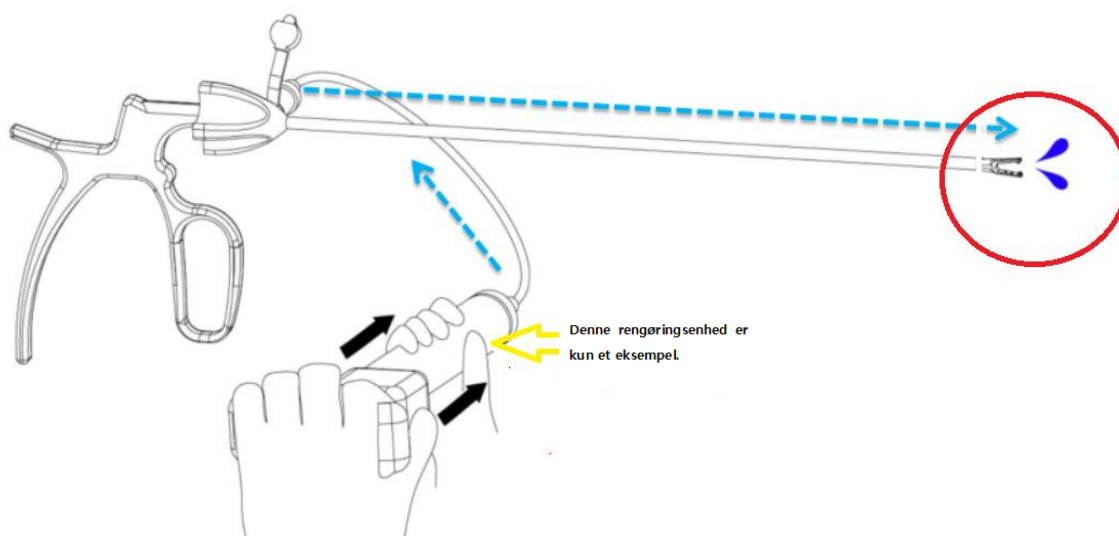

Vedligeholdelse, rengøring og sterilisering af Clipsetang:

Clipsetænger er sarte og kan let blive beskadiget. Misbrug af clipsetang kan resultere i ukorrekt belastning og/eller lukning af ligeringsklemmerne. Passende pleje, rengøring og vedligeholdelse er vigtige for at sikre en korrekt funktion. Alle flergangs clipsetænger leveres usterile. Instrumentet skal rengøres og steriliseres før hver brug. Rengør instrumentet inden sterilisering på samme måde som ethvert genanvendeligt instrument og i overensstemmelse med hospitalspraksis.

Minimumsvaliderede dampsteriliseringsparametre, der kræves til opnåelse af et 10-6-sterilitetssikringsniveau (SAL), er som følger:

Sterilisation Metode	Instrument Konfiguration	Temperatur	Eksponerings-tid (minimum)	Tørretid (minimum)
PreVac	Indpakket	270°F(132°C)	4min	10min
PreVac	Indpakket	273°F-279°F (134°C-137°C)	3min	10min
PreVac	Indpakket	275°F(135°C)	3min	10min
Tyngdekraft	Indpakket	270°F-275°F (132°C-135°C)	10min	10min

Bemærk: Fabrikantens Instruktioner for drift og belastning skal følges nøje. Man bør være opmærksom på, at enhver steriliseringsproces er vejledende.