


# Zero 15001 - BRUGSANVISNING




## Zero 150 C - 60ml beholder med 4% neutral formalin

①

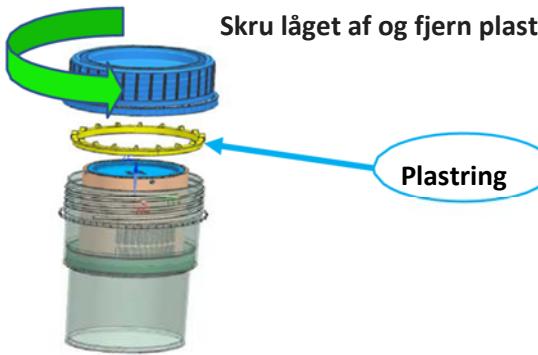


Skru låget af og fjern plastringen fra beholderen.

②

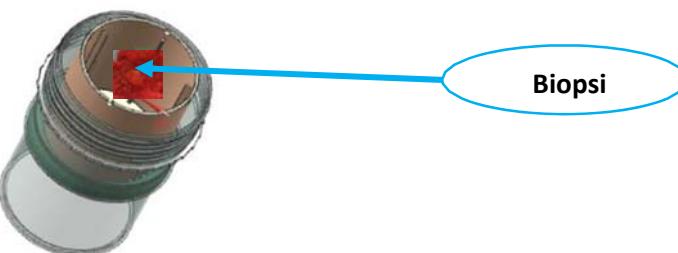

Tag biopsien og læg den i den øverste del af beholderen.

③

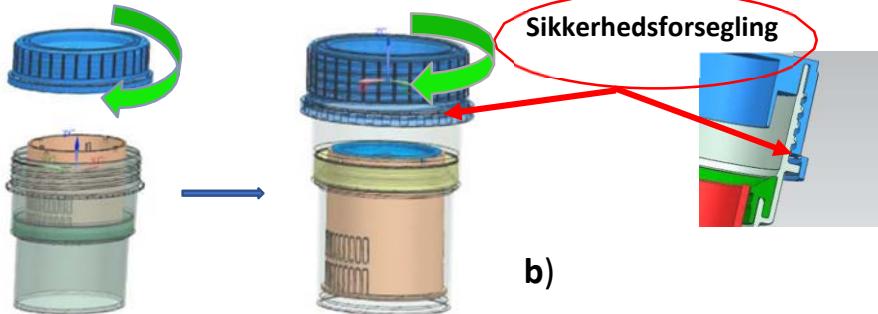

a)

b)


- Luk Zero 150 C ved at skru låget på beholderen.
- Låget skal strammes indtil man hører et click, der bekræfter at beholderen er forseglet korrekt og klar til forsendelse.

Send Zero-beholderen til analyse i henhold til lokale procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.

④



a)

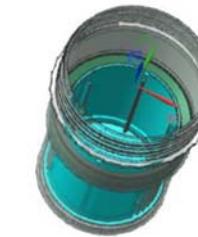

b)

- Skru låget af ved at bryde sikkerhedsforseglingen.
- Tag biopsien ud til analyse.