

## Zero 500 D - 230ml beholder med 4% neutral formalin

① Skru låget af og fjern plastringen fra beholderen.

Plastring

②

a) Løft underlåget med en pincet

b) Tag biopsien og placere den i den øverste del af beholderen.

c) Sæt underlåget på plads igen

③

a) Luk Zero 500 D ved at skru låget på beholderen.

b) Låget skal strammes indtil man hører et click, der bekræfter at beholderen er forseget korrekt og klar til forsendelse.

Send Zero-beholderen til analyse i henhold til lokale procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.

④ Fremgangsmåde til analyse: Åbn Zero i et stinkskab med udsugning.

a) Skru låget af ved at bryde sikkerhedsforseglingen.

b) Fjern underlåget ved hjælp af en pincet og tag biopsien ud til analyse.

Underlåg