

Zero 60 B - 20ml beholder med 4% neutral formalin

①

Skrul låget af og fjern plastringen fra beholderen.

Plastring

②

Tag biopsien og læg den i den øverste del af beholderen. Skrab evt. forsigtigt biopsipincetten mod den lille pind.

Biopsi

③

Sikkerhedsforsegling

a) Luk Zero 60 B ved at skru låget på beholderen.
b) Låget skal strammes indtil man hører et click, der bekræfter at beholderen er forseglet korrekt og klar til forsendelse.

Send Zero-beholderen til analyse i henhold til lokale procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.

④

Fremgangsmåde til analyse: Åbn Zero i et stinkskab med udsugning.

Underlæg

a) Skru låget af ved at bryde sikkerhedsforseglingen.
b) Fjern underlægget ved hjælp af en pincet og tag biopsien ud til analyse.