


FINESSE II BESKRIVELSE AF APPARATETS FUNKTIONER

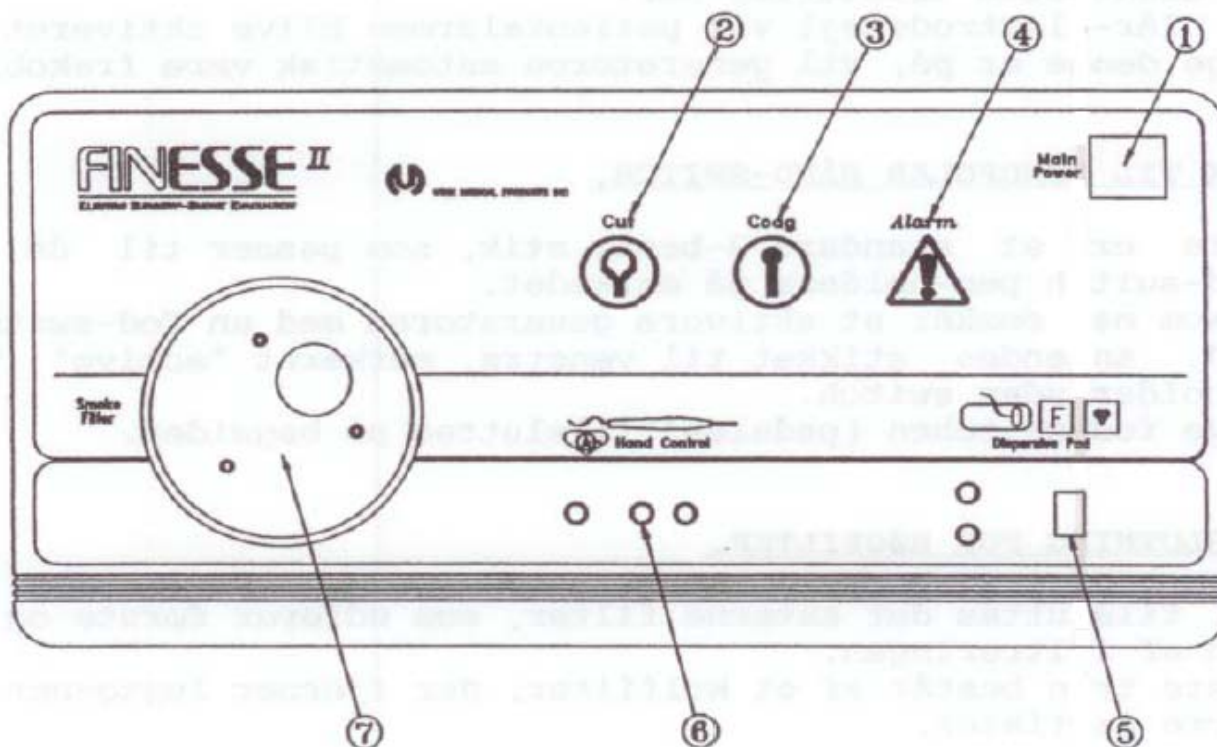

1. TÆND /SLUK –OMSKIFTER.

En grøn lampe i omskifterne lyser, når der er tændt for apparatet.

2. CUT - LAMPE

Denne gule lampe lyser, når cut-elektroden er aktiveret. Når lampen lyser, høres en tone, der er den laveste af de 3 toner, der kommer fra Finessen


3. KOAGULATIONS – LAMPE

Denne blå lampe lyser, når koagulation er aktiveret. Når lampen lyser, høres en tone, der er mellemste af de 3 toner, der kommer fra Finessen

4. PATIENT – ALARMLAMPE

Denne røde lampe lyser, når der er lår-elektrodefejl og samtidig vil den højeste alarmtone høres.

Så længe alarmen er på, vil generatoren være frakoblet, og først, når fejlen er rettet og alarmen ophørt, kan generatoren aktiveres.

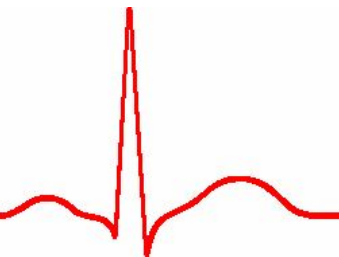

5. Stik for patient lår-elektrode.

Lår elektroden tilsluttes her. Ved lår-elektrodefejl vil patientalarmen blive aktiveret, og så længe den er på, vil generatoren være frakoblet.

6. Stik til monopol hånd-switch


Dette er et standard 3-benet stik til tilslutning af pen med håndkontrol. Ønsker man at aktivere generatoren med en pedal, anvendes stikket til venstre, markeret "active" til pen uden håndkontrol. Pedalen tilsluttes på bagsiden af generatoren.

7. Tilslutning af røgfilter

Her tilsluttes det eksterne filter, som udfører 1.trin: kulfiltrering for lugtgener samt større partikler og 2. trin: fin. partikelfiltrering

Tilslutning

1. Tilslut det eksterne filter.
2. Tilslut slangen til filtret og den anden ende til øverste slangestuds på speklet
3. Tilslut pen til 3-benet hand Control stik
4. Tilslut kablet fra lårelektorden til Finessen, hvor der står Dispersive Pad
5. Sæt lårelektroden på patientens lår. Sørg for den sidder godt fast og har god kontakt

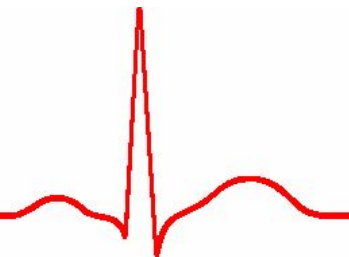

BETJENING

1. Tænd for Finessen på knappen “Main Power”
2. Indsæt loopen i pen, indtil loopens metalskaft sidder fast i pennen.
3. Begynd at skære ved at trykke på den gule knap på pennen eller gul pedal. Før loopen gennem vævet med mest mulig kontakt mellem væv og elektrode, indtil det område, som skal fjernes, er skåret ud. Det er **vigtigt**, at man ikke stopper midt i denne procedure, men udfører den i en jævn fortløbende bevægelse. Det bedste resultat opnås, når der skæres i et snit uden stop undervejs.
4. Fjern loopen fra pennen, og isæt kugleelektroden, hvis der skal efterkoaguleres
5. Begynd koagulering ved at trykke på blå knap på pen eller blå pedal. Hold en meget lille afstand mellem elektrode og væv, mens elektroden bevæges henover det område, der skal koaguleres. Det er vigtigt, at der ikke er for meget blod, når der koaguleres. Fjern blodet, så man kan se hvilke kar, der står og siver og koaguler derefter hurtigt dette område.
6. Suget vil automatisk starte, når den gule eller blå knap på pennen eller pedalen aktiveres, og fortsætte indtil 2 sek. efter disse er deaktiverede. Ønskes suget helt afbrudt, kan dette gøres på switchen på bagsiden.

FEJLMELDINGER

1. Hvis begge knapper, cut og coag, trykkes ned samtidig høres en kontinuerlig tone til fejlen er rettet
2. Hvis lårelektroden ikke er forbundet til apparatet, eller en ledning er beskadiget høres en intermitterende tone
3. Bruges der ikke- spilt lårelektrode, som ikke har kontakt, høres intermitterende tone.
4. Effektfejl. Output sikkerhedskredsen monitorer kontinuerligt og er der diskrepans mellem den forudindstillede output og den givne output slås systemet fra. En kontinuerlig tone høres. Sluk apparatet for at genindstille. Hvis fejlen kommer igen kontakt Apgar.