



**1.** Før navleklemmen over spidsen på hæmostaten.


**!** Udvid ikke navleklemmen mere end nødvendigt. Dette kan få ringen til at gå i stykker.

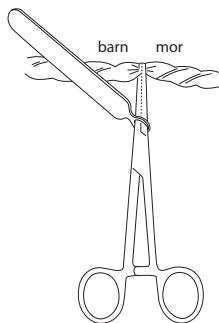


**2.** Klem navlestrengen sammen med hæmostaten tæt på barnet. NB! Sørg for, at spidsen af hæmostaten flugter med navlestrengens sammenpressede side

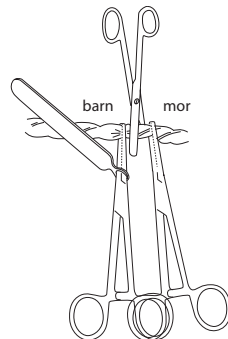


**3.** Placer en hæmostat ved siden af den første nærmere moderen. Klip navlestrengen over mellem hæmostaterne med navlesaksen.

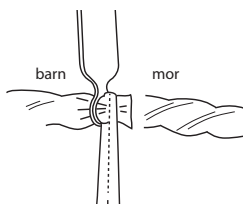

**4.** Tag fat i navleklemmens trækplade, og træk ringen af hæmostaten og over navlestrengen.

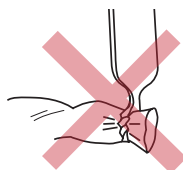



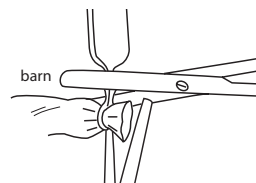






**5.** Undgå at navleklemmens ring bliver vredet som vist på billedet. Dette kan få ringen til at knække.



**6.** Klip navleklemmens trækplade af mindst 1 mm fra navleklemmens ring, som nu ligger omkring navlestrengen. Løsn hæmostaten.



Kontroller navleklemmen nøje de første 24 timer derefter.

 Læs brugervejledningen	 Producent	 Må ikke genbruges. Engangsprodukt.
 Artikelnummer	 Anvendes før	 ER i overensstemmelse med direktivet for medicintekniske produkter 93/42/EØF (0402).
 Lotnummer	 Anvend ikke åben forpakning.	 STERILEO Steriliseret med etylenoxid.



REF: 9607 og 9607S

40-9607/9607S-210315

Kvalitet ISO 9001 Miljø ISO 14001 Medical ISO 13485

**Wing Plast** - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, 0371 330 30, info@wingplast.se, www.wingplast.se



**Wing Plast AB**