

Retractor

Betjeningsvejledning

REVEEL er et engangs laparoskopi produkt bestående af en kanyle med en skaftdiameter på under 5mm. Aktivering af REVEEL giver en atraumatisk HARPE-FORMET [90 x 70] retraktions-overflade med høj friktion

Tilsløget brug/brugsvejledning

REVEEL er udformet som en lever-retractor til brug ved endoskopiske kirurgi procedurer med henblik på at mobilisere og hæve leveren for at give bedre adgang, visualisering og stabilisering af det kirurgiske område

Kontraindikationer

Undgå at anvende, når endoskopisk operation er kontraindikeret

Advarsler og forholdsregler

1. Sørg for at læse og følge nedenstående brugsvejledning før ibrugtagning. Skade på instrumentet kan forårsage patientskader. Sørg for altid at efterse instrumentet omhyggeligt for fuld funktionalitet før brug
2. REVEEL-retractorer må kun anvendes af personale med tilstrækkelig træning og fortrolighed med minimalt invasive teknikker. For yderligere oplysninger om teknikker, komplikationer og risici henvises til det medicinske litteratur.
3. For at undgå brandsår og risiko for chok for patient og operatør eller instrumentskader er det nødvendigt at have komplet viden om laserendoskopi og elektrokirurgiske procedurer

Brugsvejledning

1. Insuffler den peritoneale abdominalhule ved brug af almindelig endoskopisk teknik
2. Når der er opnået tilstrækkeligt insufflationstryk, foretages et lille snit i huden på det påkrævede område. BEMÆRK: Stedet, hvor snittet foretages, afhænger af den påkrævede procedure, patientens størrelse og kirurgens personlige præference
3. Indfør en trokar (eller lignende obturator) på 5mm gennem åbningen.
4. Under direkte endoskopisk synsfelt indsættes REVEEL- retractor forsigtigt med en jævn, kontrolleret bevægelse.

Forsigtig:


Fjern den røde beskyttelseskappe før brug

Selvom REVEEL-retractor ikke er skarp, skal der udvises forsigtighed, når den bruges for at undgå skade på større blodkar og andre anatomiske strukturer

Sørg for at beskytte andre organer under brug af REVEEL-retractor ved at sikre, at patientens krop placeres korrekt

Sørg for at holde REVEEL-retractor væk fra større blodkar og andre anatomiske strukturer

Undgå at bruge unødigt kraft under indføring, mobilisering og retraktion af væv/organer og fjernelse af REVEEL-retractor

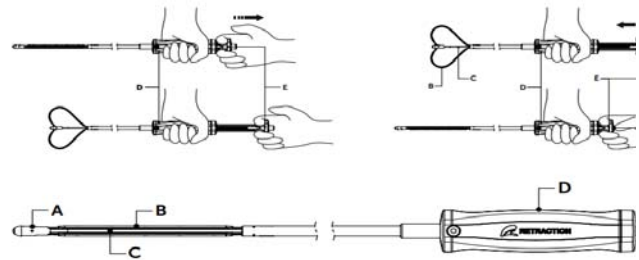

- A. Stump spids til indføring i hud
- B. Retraktionsarm
- C. I-stang
- D. Håndtag
- E. Håndtag
- F. Knap

Forsøg ikke at indføre eller fjerne REVEEL-retraktoren fra det pågældende område, medmindre retraktionsarmene er i helt lukket position. I modsat fald kan det være umuligt at indføre eller fjerne produktet, og det kan risikere at beskadige retraktions-armene og/eller stedet for indføring

5. Ved direkte endoskopisk synsfelt udløses REVEEL-retraktoren ved at holde fast i håndtag D og trække i håndtag E, indtil enten den ønskede grad af indføring er opnået, eller du ikke kan trække yderligere

FORSIGTIG:

Før retraktionsarmene lukkes, skal det sikres, at der ikke er noget væv i klemme mellem retraktionsarmene og I-stangen

7. Mobilisér og træk forsigtigt vævet til side som påkrævet
8. Ved direkte endoskopisk synsfelt trækkes REVEEL-retraktoren tilbage ved at holde fast i håndtag D og trække i håndtag E, samtidig med at knappen F trykkes ind

FORSIGTIG

Læs hele brugsvejledningen omhyggeligt før brug. Overhold alle advarsler og forholdsregler anført i denne brugsvejledning. I modsat fald kan det medføre komplikationer



REF

Katalognummer

LOT

Serienummer

QTY

Mængde

STERILE R

Steriliseret ved brug af bestråling



Produktionsdato



Producent



Mindst holdbar til



Forsigtig



Bør ikke genbruges



Bør ikke gensteriliseres



Undgå at bruge, hvis emballagen er beskadiget



Temperaturbegrænsning



Latexfri

Opbevaring og håndtering

