



Tøm luft ud: Åben ventilen

Pust op: Tryk på bolden
(luk ventilen)

1. Tjek at ballon kan pustes op og tømmes



Trækkes over den smalle del

2. Monter den tømte ballon over colpotomizer

Ca. 2cm under
20mm margin

Inflationsslangen skal
pege ned på
Colpotomizer uden at
vende ned over ballonen



3. Klargør den tømte ballon



Pump ballonen op - så der lige kan
genoprettes pneumoperitoneum,
hvis der er en lækage under
kolpotomi eller manchetlukning

Pumpes aldrig mere
op end nødvendigt

4. Pumpes nok op, til at stoppe gaslækage



Tøm ballon før du drejer
colpotomizer

Genopfyld om
nødvendigt, når
Colpotomizer er i ny
position

5. Tøm ballonen for at rotere Colpotomizer