

Universal Armbeskytter

Brugervejledning

Universal Armbeskytter kommer præ-positioneret klar til at beskytte patienter af gennemsnitlig størrelse. For at imødekomme mindre eller større patienter kan Universal Armbeskytterne nemt tilpasses ved at justere komponentdelene: Armbeskytter, håndledsstøtte af skum og velcro.

Hvis du finder det nødvendigt at flytte håndledsstøtten, skal du bruge de vævede faner i hver ende af håndledsstøtten til at adskille den fra armbeskytteren. Numre der repræsenterer hvert "trin", står på Universal Armbeskytteren for at hjælpe ved brug. Se venligst de tilsvarende billeder og trin nedenfor.

STEP 1

Sørg for at bruge armbeskytteren identificeret med "1R" på patientens "højre arm", og brug armbeskytteren, der er identificeret med "1L" på patientens "venstre arm". Sørg for, at "1R" eller "1L" vender udad.

Armbeskytteren åbnes ved at løsne velcrobåndene. Velcrobåndene må ikke fjernes fra armbeskytteren.

STEP 2

Placer den ønskede armbeskytter mellem patienten og armen med tommelfingeren pegende opad.

Bemærk venligst: Patientens fingre skal være helt dækket af armbeskytteren.

STEP 3

Lokaliser "3"-symbolet og træk skummet over/omkring patientens arm og hold det på plads med din hånd.

STEP 4

Lokaliser "4"-symbolet og træk armbeskytteren over "3"-symbolet/patientens arm. Luk armbeskytteren med de hvide velcrobånd og fastgør herefter de blå velcrobånd for enden.

STEP 5

Hvis patienten har korte arme, kan man vælge, at folde enden af armbeskytteren omkring, så armbeskytteren lukkes med den blå velcro

STEP 6 (ikke illustreret)

For at kunne rette på eller mobilisere patientens arm skal du løsne det blå velcrobånd.

