

Brugsanvisning

Retraktor og kroge til engangsbrug

VIGTIGE OPLYSNINGER - LÆSES INDEN BRUG!


FORSIGTIG

Læs følgende oplysninger grundigt før brug af dette produkt. Denne brochure er udviklet som en hjælp til brug af produktet. Den er ikke en henvisning til kirurgiske teknikker.

Forpakning

Surgitools' retraktorer og kroge til engangsbrug er sterile ved levering. Hvis emballagen er beskadiget, må de ikke bruges. Må ikke gensteriliseres. Genbehandling af udstyr til engangsbrug kan udgøre en risiko for krydskontaminering og infektioner hos patienten og/eller funktionsfejl ved udstyret. Efter brug skal engangskomponenter kasseres som smittefarligt affald.

Brugsanvisning

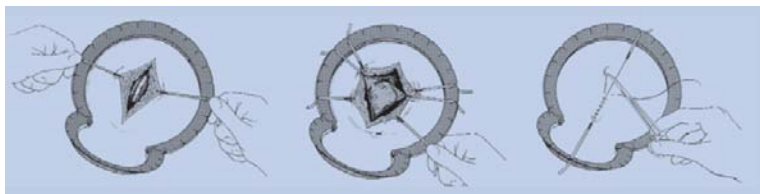

1. Placer retraktoren omkring det første snit. Placer de elastiske holdekroge i vævet og træk det tilbage i direkte modsatte kvadranter. Åbninger på ringen gør den nemt at placere og spænde korrekt.
2. Det er muligt at omplacere eller tilføje kroge under indgrebet for at opretholde en jævn reaktion.
3. Ved lukning kan de elastiske holdekroge placeres langs snittets akse for at generere spænding til at sikre præcis placering af hæfteklammer eller sutur.

Senest revideret i oktober 2021

Model	Specifikation	Emballage
ST SG1601-R	Retraktor, 25,3*11,3 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk
ST SG1602-R	Retraktor, 22,0*11,3 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk
ST SG1603-R	Retraktor, 32,5*18,3 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk
ST SG1604-R	Retraktor, 14,1*14,1 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk
ST SG1605-R	Retraktor, 18,6*18,3 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk, 20/ctn
ST SG1606-R	Retraktor, 28,3*14,1 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk, 20/ctn
ST SG1607-R	Retraktor, 25,0*25,0 cm, steril plastik, engangsbrug	1 stk/pk, 20/ctn
ST SG1601-H-1	Skarpe kroge, 3 mm, sterile, engangsbrug	1 stk/pk, 20/bx
ST SG1601-H-2	Skarpe kroge, 3 mm, sterile, engangsbrug	2 stk/pk, 20/bx
ST SG1601-H-6	Skarpe kroge, 3 mm, sterile, engangsbrug	6 stk/pk, 20/bx
ST SG1602-H-1	Skarpe kroge, 5 mm, sterile, engangsbrug	1 stk/pk, 20/bx
ST SG1602-H-2	Skarpe kroge, 5 mm, sterile, engangsbrug	2 stk/pk, 20/bx
ST SG1602-H-6	Skarpe kroge, 5 mm, sterile, engangsbrug	6 stk/pk, 20/bx
ST SG1603-H-1	Stumpe kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	1 stk/pk, 20/bx
ST SG1603-H-2	Stumpe kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	2 stk/pk, 20/bx
ST SG1603-H-6	Stumpe kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	6 stk/pk, 20/bx
ST SG1604-H-1	Todelte kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	1 stk/pk, 20/bx
ST SG1604-H-2	Todelte kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	2 stk/pk, 20/bx
ST SG1604-H-4	Todelte kroge, 12 mm, sterile, engangsbrug	4 stk/pk, 20/bx

Bemærk: Udstyret er latex-frit og Nikkel-frit.

OPBEVARING

Arbejdstemperaturområde: 10 °C (50 °F) op til +40 °C (104 °F)

Område for relativ fugtighed: ≤ RH80 %

Område for atmosfæretryk: 760 hPa~1060 hPa

OPBEVARING OG STERILISERING

Instrumenterne er ETO-steriliseret. Instrumenterne skal opbevares i et rent, tørt område uden fugt og direkte sollys. Instrumenterne skal opbevares individuelt i den æske, de blev sendt i, eller beskyttet på anden måde.

TRANSPORT- OG OPBEVARINGSFORHOLD

Under transport af udstyret, bør det undgås, at det bliver vådt, rystet og stødt.

Udstyret skal indpakkes i egnet emballage. Det skal herefter opbevares i lokaler ved:

- En relativ fugtighed, der ikke overstiger RH80 %,
- Temperaturer fra -10 °C (14 °F) op til +50 °C (122 °F),
- Område for atmosfæretryk: 760 hPa~1060 hPa,
- Opbevares uden for direkte sollys og ætsende gas.

POLITIK FOR RETURNEREDE PRODUKTER

Produkter skal returneres i uåbnet emballage med producentens forsegling intakt for at kunne ombyttes eller krediteres, medmindre returneringen gælder en reklamation over produktfejl. Påvisning af en produktfejl vil blive foretaget med SEGIMED. Ombytning af produkter accepteres ikke, hvis de har været i kundens besiddelse i mere end 120 dage.

ANVENDTE SYMBOLER PÅ VAREDEKLARATIONEN



Producent



Autoriseret repræsentant i EU

Senest revideret i oktober 2021



Katalognummer



Lotnummer



Se brugsvejledningen



Læs brugsvejledningen



Engangsbrug



Brug ikke, hvis emballagen er beskadiget



ETO-steriliseret



0197 Produktet overholder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr



Surgitools (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd

Adresse: Room 426, No.255 Shuangbang Road, Xujing Town, Qingpu District, Shanghai 201702, Kina

Tlf.: 0086-574-63565697

<http://www.segimedical.com>



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland

Tlf.: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726