

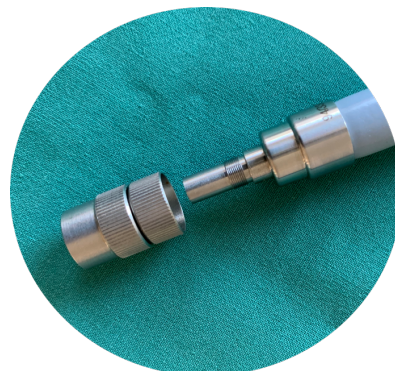


Quick-Guide GUBBINI mini resektoskop

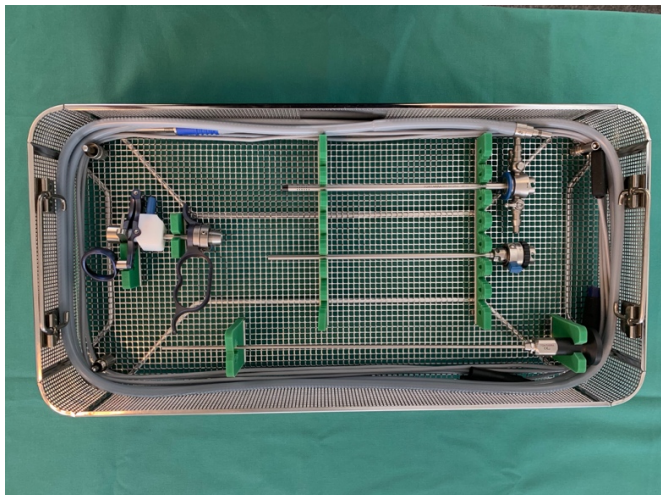


OBS vend den rillede side af adapteren ind mod lyskablet

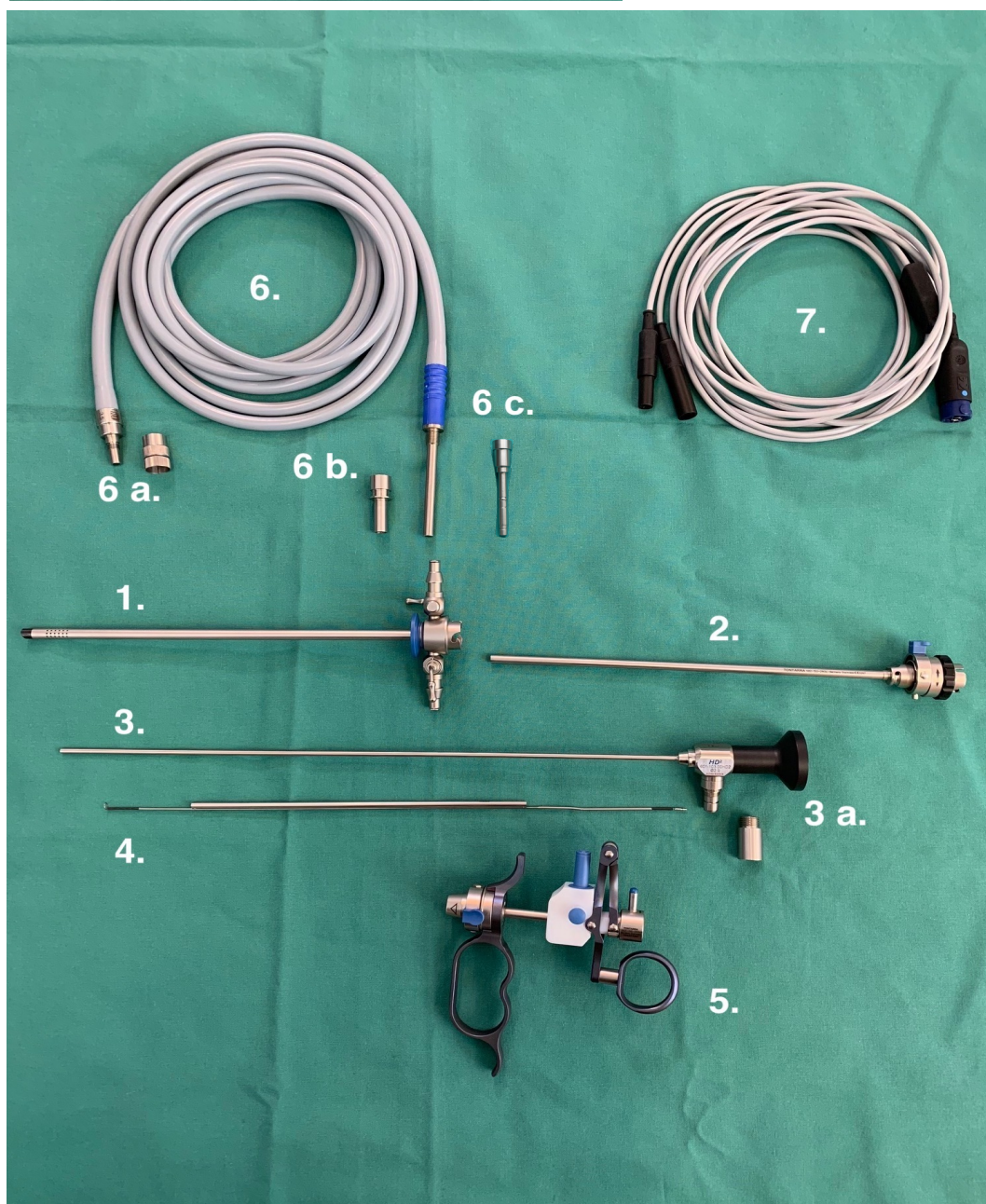

1. Ydre rør
 2. Indre rør
 3. Optik 0° inkl. adapter
 - 3 a. Adapter
 4. Slynge/ball
 5. Arbejdselement
 6. Lyskabel inkl. adapter
 - 6 a. Adapter
 - 6 b. Adapter Karl Storz
 - 6 c. Adapter Olympus
 7. Bipolært kabel
8. Start med at sætte adapter 6 a. og 6 b. på lyskablet og 3 a. på optikken (3)



9. Sørg for at adapter (3.a) sidder på optikken (3)
10. Ydre rør (1) og indre rør (2) samles
11. Indfør optikken (3) i arbejds-elementet (5) og lås optikken fast med det lille håndtag på arbejds-elementet (5)
12. Sæt derefter slyngen (4) på optikken (3)
13. Slyngen (4) skal ramme det øverste hul i arbejds-elementet (5) over optikken (3) hvorefter du vil høre et klik

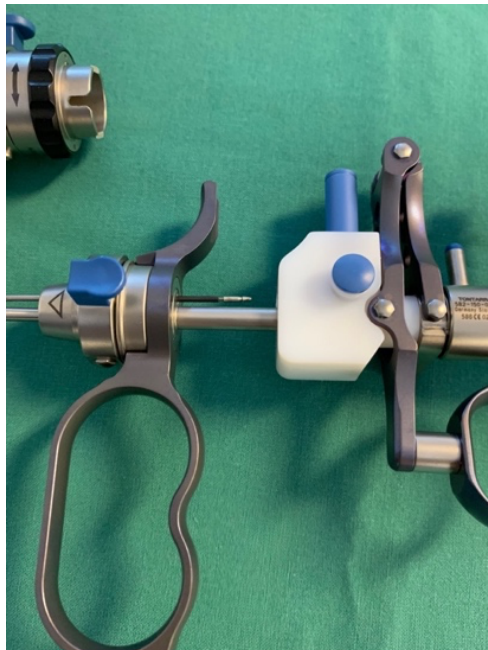



14. Det samlede ydre og indre rør, sættes sammen med arbejds-elementet (med optik og slynge)



15. Sørg for at adapter 6 a. og 6 b./- eller 6 c. sidder på lyskablet
16. Tilslut lyskabel
17. Tilslut bipolært kabel til jeres el-kir. enhed (indstilles på saltvandsprogram)
18. Tilslut kamera og hvidbalancere
19. In/out flow slanger tilsluttes

GUBBINI er nu klar til brug

Efter brug fjernes engangs eller flergangsslyngen ved at trykke på den blå knap

