

Nedre rumindhold: 20 ml Neutral bufret formalin 10 % v/v (4 % w/v)



### FASE 1 – ÅBNING AF CONTAINEREN

SKRU HÆTTEN AF MOD URET

FJERN OG KASSER DEN GULE SILIKONE RING

NEDRE RUM MED 20ml  
FORMALIN



ÅBNINGEN AF BEHOLDEREN GØR PRØVERUMMET TILGÆNGELIGT  
FOR INDSÆTNING AF PRØVEN

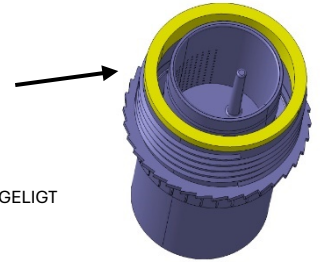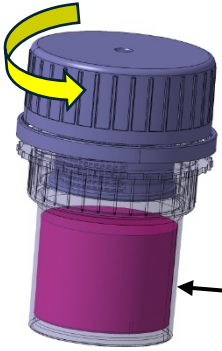

### FASE 2 – ILÆGNING AF PRØVEN

LÆG DEN BIOLOGISKE PRØVE I KURVEN

EN LILLE PLASTSTANG ER BLEVET PLACERET INDE I RUMMET FOR  
AT HJÆLPE OPERATØREN MED AT SLÅ MEGET SMÅ PRØVER AF

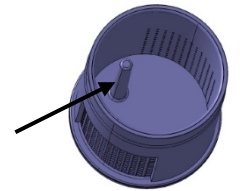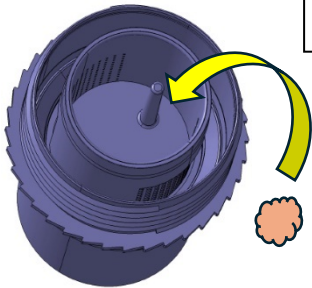


### FASE 3 – LUKNING OG AKTIVERING

SKRU HÆTTEN PÅ TIL DEN ER HELT STRAM

STRAMNING AF LÅGET VIL FORÅRSAGE:

- *KURVEN MED PRØVEN FALDER NED I FORMALINEN I DET NEDERSTE RUM*

*PLACERING AF LÅG PÅ SELVE KURVEN FOREGÅR AUTOMATISK. (LÅGET ER  
ALLEREDE FORMONTET I HÆTTET)*

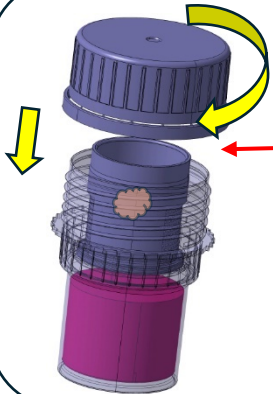


### FASE 4 - ÅBNING/ANALYSE I LABORATORIET





SKRU HÆTTEN AF MOD URET. ÅBNING VIL AUTOMATISK BRYDE  
FORSEGLINGEN

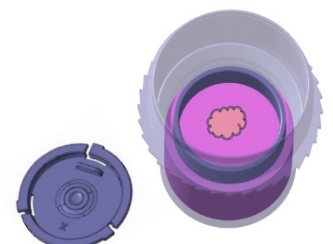FJERN LÅGET

TAG PRØVEN ELLER PRØVERNE UD OG ANALYSER



**10 % v/v (4 % w/v) NEUTRAL BUFFERT FORMALIN 20 ml**

	<i>Til fiksering af histologiske prøver Til in vitro diagnostisk brug</i>
	<i>Biologisk risiko, når der er biopsi eller organisk materiale til stede</i>
	<i>Engangsanordning</i>
	<i>Ikke-steril enhed</i>

**Produktbeskrivelse**

Beholder fyldt med 20 ml neutral bufret formalin 10 % v/v (4 % w/v)

**BRUGSVEJLEDNING**
**Prøveforberedelse**

Prøven skal nedsænkes i Formalin umiddelbart efter opsamling for passende fiksering, der beskytter den mod nedbrydningsprocesser.

**PROCEDURE**

1. Skru hættten af og fjern den gule ring
2. læg den biologiske prøve i kurven
3. Skru hættten på, indtil kurven falder ned i fikseringsmidlet
4. I det patologiske anatomi-laboratorium: Skru låget af beholderen, fjern låget og udtag prøven

**OPBEVARING OG STABILITET**

Opbevares lukket i et ventileret miljø ved en temperatur på 15-30°C (59-86°F).

Udløbsdatoen er trykt på etiketten. Produktet er gyldigt i 2 år.

**Bortskaffelse:** Indholdet og/eller beholderen skal bortskaffes på en specifik bortskaffelsesfacilitet

**Meccanica GM S.r.l.**

Via Barca snc - 60025 Loreto (AN) - Italia

Tel. 0039 071.970727

e.mail: medical@meccanicagm.com


**FARE**
**Faresætninger:**

- Farlig ved indtagelse.
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Mistænkt for at forårsage genetiske ændringer.
- Kan forårsage kræft. Kan irritere luftvejene.


**Forsigtighedsråd:**


- Indhent specifikke instruktioner før brug.
- Undgå indånding af røg/tåge/dampe.
- Bær handsker og beskyttelsestøj.
- Beskyt dine øjne og ansigt.
- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask grundigt med vand og sæbe.
- VED INDÅNDING:
- Transporter den tilskadekomne til frisk luft og hold ham i ro i en stilling, der letter vejrtrækningen.
- I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNENE:
- Skyl grundigt i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.
- VED EKSPONERING eller mulig eksponering, søg læge.
- Opbevar beholderen tæt lukket og på et godt ventileret sted.
- Indeholder: FORMALDEHYD 4% w/v; METHYL ALKOHOL.

**Neutral bufret formalin 4 % w/v (10 % v/v)**

CAS No. 50-00-0

pH tra 7,0 e 7,4

Tæthed 1,02 kg/l(T 25°C)

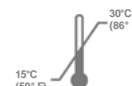**Methylalkohol < 0,5% CAS No. 67-56-1**
**VIGTIGE ADVARSLER**


I tilfælde af en alvorlig ulykke i forbindelse med udstyret skal du straks informere producenten og leverandøren i det område, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.