

ZE 06011 - Øvre rumindhold: 10 ml fosfatbuffer saltvand (PBS)
Nedre rumindhold: 10 ml Formalin 8% w/v

FASE 1 – ÅBNING AF CONTAINEREN



SKRU HÆTTEN AF MOD URET

FJERN OG KASSER DEN RØDE SILIKONERING

ØVRE BEHOLDER MED
10ml BUFFER

NEDRE RUM MED 10ml
FORMALIN



ÅBNING AF BEHOLDEREN GØR PRØVERUMMET TILGÆNGELIGT
(FORFYLDT MED 10 ML PHOSPHATBUFFER - PBS) TIL ILÆGNING AF
PRØVEN

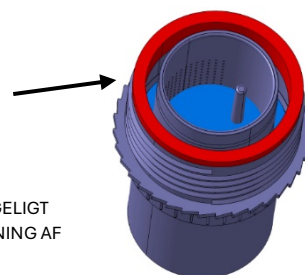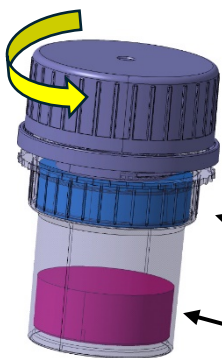

FASE 2 – ILÆGNING AF PRØVEN

LÆG DEN BIOLOGISKE PRØVE I KURVEN MED
PHOSPHATBUFFERSALT (PBS)

EN LILLE PLAST STANG ER PLACERET INDE I RUMMET FOR AT
HJÆLPE OPERATØREN MED AT SLÅ MEGET SMÅ PRØVER AF

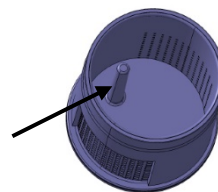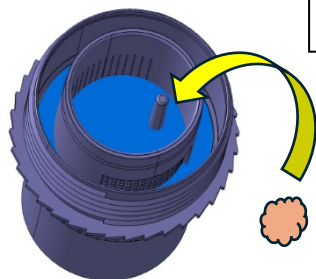


FASE 3 – LUKNING OG AKTIVERING

SKRU HÆTTEN PÅ TIL DEN ER HELT STRAM

STRAMNING AF HÆTTEN VIL FORÅRSAGE:

- KURVEN MED PRØVEN FALDER NED I FORMALINEN I DET NEDERSTE RUM

PLACERING AF LÅG PÅ SELVE KURVEN FOREGÅR AUTOMATISK. (LÅGET ER
ALLEREDE FORMONTET I HÆTTET)

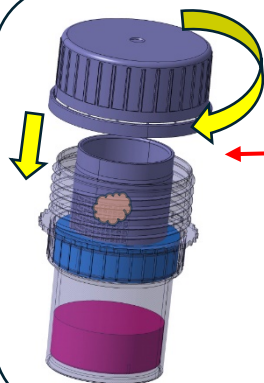


FASE 4 – ÅBNING/ANALYSE I LABORATORIET

SKRU HÆTTEN AF MOD URET. ÅBNING VIL AUTOMATISK BRYDE
FORSEGLINGEN

FJERN LÅGET VED HJÆLP AF EN PINCET

TAG PRØVEN ELLER PRØVERNE OG ANALYSER

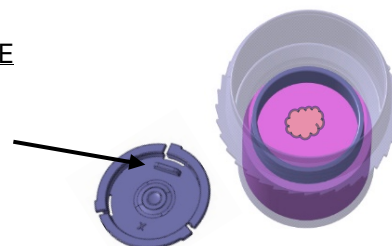

8 % w/v IKKE-BUFFERET NEUTRAL FORMALIN 10 ml + PBS
Fosfatbuffer (isotonisk opløsning) 10 ml

	<i>Til fiksering af biologiske prøver til in vitro diagnostisk brug</i>
	<i>Biologisk risiko, når der er biopsi eller organisk materiale til stede</i>
	<i>Engangsanordning</i>
	<i>Ikke-steril enhed</i>

Produktbeskrivelse

Beholder fyldt med 8 % w/v IKKE-BUFFERET NEUTRAL FORMALIN 10 ml + PBS
 Fosfatbuffer (isotonisk opløsning) 10 ml

BRUGSANVISNING

Prøveforberedelse

Prøven skal nedsænkes i Formalin umiddelbart efter opsamling, for passende fiksering, der beskytter den mod nedbrydningsprocesser.

PROCEDURE

1. Skru hættten af og fjern den røde ring
2. læg den biologiske prøve i kurven, skyl pincet i fosfatbufferen eller brug den plastikpind, der allerede findes inde i beholderen
3. Skru hættten på, indtil kurven falder ned i fikseringsmidlet
4. I det patologiske anatomi-laboratorium: Skru låget af beholderen, fjern låget og udtag prøven

OPBEVARING OG STABILITET

Opbevares lukket i et ventileret miljø ved en temperatur på 15-30°C (59-86°F).

Udløbsdatoen er trykt på etiketten. Produktet er gyldigt i 2 år.

Bortskaffelse: Indholdet og/eller beholderen skal bortskaffes på et specifikt bortskaffelsessted



FARE

- Faresætninger:
- Farlig ved indtagelse.
 - Forårsager hudirritation.
 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
 - Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Mistænkt for at forårsage genetiske ændringer.
 - Det kan forårsage kræft. Kan irritere luftvejene.



Forsigtighedsråd:

- Indhent specifikke instruktioner før brug.
- Undgå at indånde røg/tåge/dampe.
- Bær handsker og beskyttelsestøj.
- Beskyt dine øjne og ansigt.
- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask grundigt med vand og sæbe.
- VED INDÅNDING:
Flyt tilskadekomne ud i frisk luft, og hold ham i ro i en stilling, der letter vejtrækningen.
- I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNE:
Skyl grundigt i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.
- VED EKSPONERING eller mulig eksponering, søg læge.
- Opbevar beholderen tæt lukket og på et godt ventileret sted.
- Indeholder: FORMALDEHYD 8% w/v; METHYL ALKOHOL.

Formalin 8 % w/v Neutral ubuffret (20 % v/v)

CAS No. 50-00-0

pH tra 7,0 e 7,4

Tæthed 1,02 kg/l(T 25°C)


Methylalkohol < 0,5% CAS No. 67-56-1

Fosfatbuffer (isotonisk opløsning)

- *Monobasisk natriumfosfat* CAS No. 10049-21-5

- *Dibasisk natriumfosfat* CAS No. 10039-32-4

VIGTIGE ADVARSLER

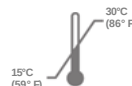

Meccanica GM S.r.l.

Via Barca snc - 60025 Loreto (AN) - Italia

Tel. 0039 071.970727

e.mail: medical@meccanicagm.com

I tilfælde af en alvorlig ulykke i forbindelse med udstyret skal du straks informere producenten og leverandøren i det område, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.