



ZE 15001 - Nederste rumindhold: 60 ml Neutral bufret formalin 10 % v/v (4 % w/v)

### FASE 1 – ÅBNING AF CONTAINEREN

SKRU HÆTTEN AF MOD URET


FJERN OG KASSER DEN GULE SILIKONE RING

NEDRE RUM MED 60ml  
FORMALIN

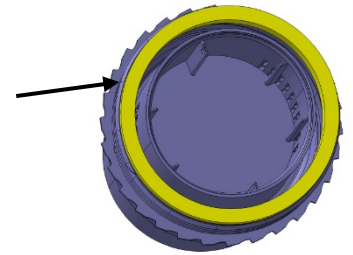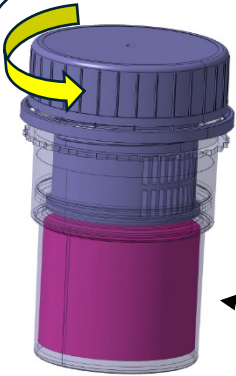

### FASE 2 – ILÆGNING AF PRØVEN

LÆG DEN BIOLOGISKE PRØVE I KURVEN

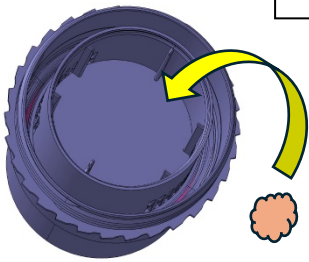


### FASE 3 – LUKNING OG AKTIVERING

SKRU HÆTTEN PÅ TIL DEN ER HELT STRAM

STRAMNING AF HÆTTEN VIL FORÅRSAGE:


- PRØVEN FALDER NED I FORMALINEN I DET NEDERSTE RUM

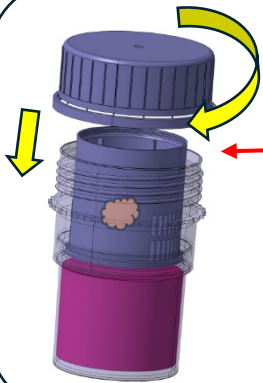





### FASE 4 – ÅBNING/ANALYSE I LABORATORIET

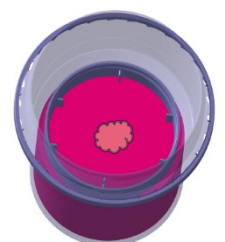SKRU HÆTTEN AF MOD URET. ÅBNING VIL AUTOMATISK BRYDE FORSEGLINGEN

TAG PRØVEN ELLER PRØVERNE OG ANALYSER



10 % v/v (h % v/v) FORMALINE SUTRA TAMPON 60 ml

	Til fiksering af biologiske prøver til in vitro diagnostisk brug
	Biologisk risiko, når der er biopsi eller organisk materiale til stede
	Engangsanordning
	Ikke-steril enhed

## Produktbeskrivelse

Beholder fyldt med 60 ml neutral bufret formalin 10 % v/v (4 % w/v)

## BRUGSANVISNING

### Prøveforberedelse

Prøven skal nedsænkes i Formalin umiddelbart efter opsamling for passende fiksering, der beskytter den mod nedbrydningsprocesser.

## PROCEDURE

1. Skru hættten af og fjern den gule ring
2. læg den biologiske prøve i kurven
3. Skru hættten på, indtil kurven falder ned i fikseringsmidlet
4. I det patologiske anatomi-laboratorium: Skru hættten af beholderen, fjern låget og udtag prøven

## OPBEVARING OG STABILITET

Opbevares lukket i et ventileret miljø ved en temperatur på 15-30°C (59-86°F).

Udløbsdatoen er trykt på etiketten. Produktet er gyldigt i 2 år.

**Bortskaffelse:** Indholdet og/eller beholderen skal bortskaffes på et specifikt bortskaffelsessted



**Meccanica GM S.r.l.**

Via Barca snc - 60025 Loreto (AN) - Italia

Tel. 0039 071.970727

e.mail: medical@meccanicagm.com



### Indicazioni di pericolo:

- Farlig ved indtagelse.
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Mistænkt for at forårsage genetiske ændringer.
- Det kan forårsage kræft. Kan irritere luftvejene.



### Forsigtighedsråd:

- Indhent specifikke instruktioner før brug.
- Undgå at indånde røg/tåge/dampe.
- Bær handsker og beskyttelsestøj.
- Beskyt dine øjne og ansigt.
- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask grundigt med vand og sæbe.
- VED INDÅNDING: Flyt tilskadekomne ud i frisk luft, og hold ham i ro i en stilling, der letter vejrtrækningen.
- I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNE: Skyl grundigt i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.
- VED EKSPONERING eller mulig eksponering, søg læge.
- Opbevar beholderen tæt lukket og på et godt ventileret sted.
- Indeholder: FORMALDEHYD 4% w/v; METHYL ALKOHOL.

### **Formalin 4% w/v Neutral bufret (10% v/v)**


CAS No. 50-00-0

pH tra 7,0 e 7,4

Tæthed 1,02 kg/l(T 25°C)

### **Methylalkohol < 0,5% CAS No. 67-56-1**

## VIGTIGE ADVARSLER

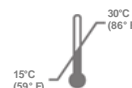

I tilfælde af en alvorlig ulykke i forbindelse med udstyret skal du straks informere producenten og leverandøren i det område, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.