



Brugervejledning

Engangssæt til laparoskopisk sug og skylning

Indikationer / Anvendelsesformål

Engangssættet til laparoskopisk sug og skylning (LISS) er beregnet til sug og skylning under laparoskopiske indgreb.

Brugsanvisning

1. Åbn posen, og fjern produktet ved hjælp af standard aseptiske teknikker.
2. Luk G-klemmen(-erne) helt for at forhindre gennemløb.
3. Fjern beskyttelseshætten til infusionsspydet, og isæt det i udløbet på den klargjorte skyllepose.
4. Skub den røde sugeforbindelse fast på sugebeholderen eller vægporten.
5. Justér sondens firkantede indsats med hoveddelen, og skub ind, indtil du hører et tydeligt "klik". Bemærk: Sonden kan justeres i fire retninger afhængigt af den ønskede konfiguration.
6. Tryk både på den blå skylleknap og den hvide sugeknap for at klargøre til brug.
7. Åbn G-klemmen(-erne) for at tillade gennemstrømning til LISS-håndtaget, som nu er klar til brug.
8. For at skylle skal du trykke fast på den blå knap; for sugning skal du trykke fast på den hvide knap.
9. For at fjerne sonden skal du trykke på den orange knap og trække sonden væk fra håndtaget.

Bemærk:

- De to sammenlignede slanger kan trækkes fra hinanden til den ønskede længde, når den ene forbindes til sugebeholderen og den anden til skylleposen(-poserne).
- Før brug anbefales det at teste enheden ved at lade en lille mængde skyllevæske løbe i en steril beholder (eller lignende) og derefter suge den samme skyllevæske op.
- En trykpose kan anvendes på skylleposen, når øget flow er ønsket.
- Hvis overførsel eller udskiftning af skylleposen er nødvendig, skal G-klemmen(-erne) lukkes helt for at stoppe flowet. Skift derefter skylleposen, og åbn G-klemmen(-erne) igen.

Valgfri tilslutning til SpeciJar (DSJ5007)

Hvis det er nødvendigt at opsamle, opbevare eller transportere kirurgiske prøver under brug af LISS, kan SpeciJar tilsluttes:

1. Træk det hvide forbindelsesstykke af enheden, og adskil de 2 sammenlignede slanger til en længde på ca. 10 cm.
 2. Skub slangestudsene på SpeciJar fast på det hvide forbindelsesstykke.
 3. Skub silikoneslangen på SpeciJar fast på den eksponerede slangestuds på LISS-enheden.
- (Se SpeciJars brugsanvisning for fuldstændige indikationer, brugsanvisninger og forholdsregler.)

Brugsanvisning – Kun til sonder

1. Åbn posen, og fjern produktet ved hjælp af standard aseptiske teknikker.
2. Justér sonderens firkantede indsats med enheden, og skub ind, indtil du hører et tydeligt "klik".

Forholdsregler

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.

Dette udstyr må kun anvendes af uddannet sundhedspersonale. Må ikke anvendes til andre formål.

Kun til engangsbrug; må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres, da dette kan kompromittere udstyrets ydeevne eller skabe risiko for kontaminering.

Dette udstyr er sterilt (ETO). Bemærk, at denne brugsanvisning gælder for sterile produkter solgt af Fairmont Medical.

Hvis udstyret har koden "XXXX NS", henvises der til tredjepartsproducenten for oplysninger om sterilitetsspecifikationer.

Hold altid fast om infusionsspydets håndtag, når du indsætter eller fjerner det fra skyllevæskeposen.

Må ikke anvendes til røgudsugning.

Sonden må ikke bruges som løftestang, da denne kan deformere tilslutningsområdet.

Undgå langvarig brug uden skylning.

Sørg altid for, at sonden er korrekt tilsluttet, og at "klikket" høres, hvilket angiver en sikker tilslutning. Derudover skal sugeforbindelsen være korrekt tilsluttet. Forkert tilslutning kan medføre afbrydelse under proceduren.

Sørg for, at infusionsspydet/posens spids er ordentligt isat, så det ikke løsner sig under proceduren.

Sørg for, at skylle- og sugefunktionen anvendes sammen under hele brugen af enheden.

Denne enhed skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljølove og -regulativer.

Hvis der opstår kontinuerlig sugning: Afbryd den hvide sugeforbindelse for at stoppe sugefunktionen.

Materialer

LISS-serien er fremstillet af phthalatfri PVC.

Alle komponenter og emballage er latexfri.

STERILE | **EO**

Single sterile barrier system
with protective packaging inside

MD

Is a medical device



Do not re-sterilise



Made in Australia



Latex free



Keep away from sunlight



Keep dry

CE
2460

Notified Body



Do not use if packaging is
damaged



Phthalate and DEHP free

UK
CA

UK Conformity Assessed



Non-sterile



Fairmont Medical Products Pty Utd
90 Prosperity Way
Dandenong South
Victoria 3175
Australia
Ph +61 3 9720 8840
www.fairmontmedial.eom.au

LIK | **REP**

Fairmont Medical Products Utd
Elizabeth House
28 Baddow Road Chelmsford
Ph +44 (0) 1245 206800
www.fairmontmedial.eom

EC | **REP**

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

PM028 Version 3.5
Issued by U. Wood 21/02/2025

Fairmont Medical Products Pty Utd is certified to ISO 13485: 2016

Product specifications subject to change without notice. Pictures shown may vary from actual product.
© 2025 Fairmont Medical Products Pty Utd all rights reserved.