

DYSIS genanvendelige spekula – pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner



1. Produktkoder og beskrivelse

SPE001	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – lille/smalt
SPE002	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – mellem/smalt
SPE003	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – stort/smalt
SPE011	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – lille/bred
SPE012	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – mellem/bred
SPE013	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – stort/bredt
SPE043	DYSIS genanvendeligt Cusco spekulum – stor/bred offset
RSP001	DYSIS lille genanvendeligt spekulum
RSP002	DYSIS Medium Genanvendeligt Spekulum
RSP003	DYSIS Stort, smalt, genanvendeligt spekulum
RSP004	DYSIS Stort, bredt genanvendeligt spekulum
RSP005	DYSIS Stort, bredt, genanvendeligt spekulum
RSP006	DYSIS Mellem Smalt Genanvendeligt Spekulum

Det genanvendelige DYSIS-spekulum i rustfrit stål er en vigtig komponent for DYSIS-instrumentets vellykkede drift. Det har en specialdesignet mekanisme til tilslutning til DYSIS-billeddannelseshovedet for at sikre billeder af den bedste kvalitet. Korrekt pleje og vedligeholdelse af spekulumet er afgørende for at sikre kontinuerlig højtydende billeddannelse og patientsikkerhed.

2. Genbehandling af genanvendelige spekula

Kirurgiske instrumenter er designet til at udføre mange specifikke funktioner. Brug af instrumenter til andre opgaver end dem, de er beregnet til, kan resultere i beskadigelse eller brud. Korrekt rengøring, håndtering og sterilisering vil sikre, at dit kirurgiske instrument fungerer som tilsigtet og forlænger dets levetid.

Bemærk – håndter altid medicinsk udstyr forsigtigt ved genbehandling, iført beskyttelsestøj, handsker og øjenbeskyttelse i overensstemmelse med lokale sundheds- og sikkerhedsprocedurer.

	0230-53004	
	REVISION: 07	Side: 2 af 4
DYSIS genanvendelige spekula – pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner		

3. Format

Alle DYSIS genanvendelige spekula leveres ikke-sterile og skal rengøres og steriliseres før brug i henhold til procedurene beskrevet i dette dokument.

4. Inspektion og funktionstest

Foretag en visuel inspektion og kontrollér det kirurgiske instrument for skader og slitage.

5. Forholdsregler

Vær forsigtig under rengøring og sterilisering, og håndter alle spekula forsigtigt for at undgå skader. For at undgå skader på instrumenterne bør tumlebevægelser undgås.

6. Pleje og håndtering

De nedenfor beskrevne procedurer anbefales for at sikre sikker håndtering af biologisk kontaminerende instrumenter. Alle instrumenter skal steriliseres før brug. BEMÆRK: Følg altid lokale sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -forskrifter ved genbehandling af medicinsk udstyr.

7. Advarsler

Følg instruktioner og advarsler fra producenterne af alle anvendte dekontaminerings-, desinfektions- og rengøringsmidler. Undgå, hvor det er muligt, brug af mineralsyrer og skrappe, slibende midler. Ingen del af processen må overstige 140 °C. Nogle følsomme materialer kan beskadiges af højere alkaliske opløsninger (pH > 10). BEMÆRK: Engangsudstyr må ikke genbehandles og genbruges.

8. Begrænsninger ved genbehandling

Gentagen behandling har minimal effekt på de kirurgiske instrumenter, og levetiden bestemmes normalt af slid og skader under brug.

9. Forrengøring

Lad hvor det er muligt ikke blod, snavs eller kropsvæsker tørre ind på kirurgiske instrumenter. For at opnå de bedste resultater og forlænge levetiden for det medicinske udstyr, skal det genbehandles så hurtigt som muligt efter brug. Hvis det ikke kan genbehandles med det samme, skal der bruges rent vand eller et enzymatisk rengøringsmiddel for at forhindre, at snavs tørrer ud.

10. Rengøring (forholdsregler ved rengøring)

Brug en passende børste, og sørg for at den når alle dele af instrumentet. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller slibende materialer. Efter manuel rengøring skal alle enheder køres gennem en automatisk rengøringscyklus.

BEMÆRK: Instrumenterne skal tørres grundigt efter rengøring.

11. Automatiseret rengøring

Brug kun certificerede (f.eks. CE-mærkede) vaske-/desinfektionsmaskiner, og enzymatiske rengøringsmidler eller anden sæbe, godkendt til rengøring af kirurgiske instrumenter, og følg producentens brugsanvisninger, advarsler, koncentrationer og anbefalede cyklusser. Fyld instrumenterne forsigtigt, så alle sprækker, huller og riller i instrumenterne kan drænes. Vær forsigtig med ikke at overfylde vaskekurvene. Sørg for, at der i den sidste skylning anvendes blødt vand med høj renhed, der er kontrolleret for bakterielle endotoksiner.

Bemærk: Disse instruktioner er blevet valideret ved hjælp af en Inova M5 vaske- og desinfektionscyklus, der er godkendt til at omfatte en standardcyklus med forvask (30-35 °C i 9-13 minutter), vask (55-60 °C i 1-3 minutter), skylning (stuetemperatur i 1-3 minutter), desinfektion (90 °C i 1-3 minutter) og tørring (89-91 °C i 2-5 minutter). Det anvendte rengøringsmiddel var enzymatisk.

	0230-53004	
	REVISION: 07	Side: 3 af 4
DYSIS genanvendelige spekula – pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner		

12. Manuel rengøring

Manuel rengøring frarådes, hvis der er en automatisk vaske- og desinfektionsmaskine tilgængelig.

- Brug et dobbeltvasksystem (vask/skyl) dedikeret til instrumentrengøring (ikke til håndrengøring)
Sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 35 °C.
- I den første vask, mens instrumentet holdes nedsænket, påføres rengøringsmiddel med en autoklaverbar børste opløsning på alle overflader, indtil alt snavs er fjernet.
- Vær særlig opmærksom på slidser, huller og riller, og børst altid væk fra kroppen og undgå stænk.
- I den anden vask skylles instrumenterne grundigt med blødt vand med høj renhed, som er kontrolleret for bakterielle endotoksiner, så vandet når alle dele af instrumentet, og tørres derefter forsigtigt i hånden eller i et tørreskab. Spekula skal være synligt tørre, før de opbevares eller anvendes på patienter.
- Efter rengøring skal alle riller og sprækker inspiceres visuelt for fuldstændig fjernelse af snavs og væsker. Hvis der er nogen Hvis der stadig er synligt snavs eller væske, skal instrumentet returneres til gentagen dekontaminering.
- Bemærk: Manuel rengøring er IKKE en desinfektionsproces: når manuel rengøring anvendes, er det muligvis ikke tilfældet. muligt at desinficere enheden før videre håndtering.

13. Rengøringsinspektion

Efter rengøring skal du visuelt inspicere og kontrollere, at alle instrumenternes dele er blevet rengjort. Der skal også udføres en grundig inspektion for skader eller slid i rillerne og eventuelle gevindskårne dele. Tag slidte eller beskadigede dele ud af brug.

14. Sterilisering

Til sterilisering anvendes fugtig varme (dampsterilisering). En certificeret vakuumautoklave (f.eks. CE-mærket), der fungerer ved 134 °C, 30 psi i en minimum holdetid på 3 minutter eller 121 °C, 15 psi i en minimum holdetid på 15 minutter - altid i henhold til maskinproducentens anvisninger.

Ved sterilisering af flere instrumenter i én autoklavecyklus skal det sikres, at den af sterilisatorproducenten angivne maksimale belastning ikke overskrides.

BEMÆRK: Instrumenterne skal tørres grundigt og kan pakkes ind inden sterilisering.

15. Opbevaring

Sørg for, at instrumenterne er tørre før opbevaring, og at de opbevares tørt og rent ved stuetemperatur.

16. Yderligere oplysninger

Retningslinjer for rengøring og sterilisering findes i HTM 01-01 del D, HTM 01-01 del C, BS EN ISO 17665-1 og ABHI, Rapport om validering af en skabelon til genbehandlingsinstruktioner for generisk medicinsk udstyr i klasse I (Ref: SISIS 0038).

	0230-53004	
	REVISION: 07	Side: 4 af 4
DYSIS genanvendelige spekola – pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner		

BEMÆRK: DET ER OPBEVARERENS ANSVAR AT SIKRE, AT OPBEVARINGEN ER
FAKTISK UDFØRT MED HJÆLP AF UDSTYR, MATERIALER OG PERSONALE I OPBEVARINGSANLÆGET FOR AT OPNÅ DET ØNSKEDE RESULTAT.
DETTE KRÆVER VALIDERING OG RUTINEMÆSSIG OVERVÅGNING AF PROCESSEN. LIDELÆGES SKAL ENHVER AFVIGELSE FRA DE GIVEDE
INSTRUKTIONER FRA OPBEVARINGSANLAGEN VURDERES KORREKTIVT FOR EFFEKTIVITET OG POTENTIELLE NEGATIVE

KONSEKVENSER.

17. Returnering af produkter til producenten

En dekontamineringserklæring skal ledsage alle genstande, der returneres til en ekstern virksomhed.

Genstande, der ikke ankommer med en attest, vil ikke blive behandlet, men vil straks blive returneret til hospitalet til dekontaminering.