

**Formål:** NIBP-manchet bruges sammen med en blodtryksmonitor til at måle patientens arterielle tryk.

**Struktur:** NIBP-manchet indeholder manchet, oppustelige pose og luftslange. Luftslangen har enkel slange eller dobbelt slange.

**Produktkode:**

| Specifikation             |                               | Produktkode                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genanvendelig             | Enkelt, Nylon                 | M5101,M5102,M5103,M5104,M5104L,M5104XL,M5105,M5106                                                                                                                        |
|                           | Dobbelt, Nylon                | M5201,M5202,M5203,M5204,M5204L,M5204XL,M5205,M5206                                                                                                                        |
|                           | Enkelt, PU                    | M5111,M5112,M5113,M5114,M5114L,M5114XL,M5115,M5116                                                                                                                        |
|                           | Dobbelt, PU                   | M5211,M5212,M5213,M5214,M5214L,M5214XL,M5215,M5216                                                                                                                        |
|                           | Enkelt/ Dobbelt,<br>Polyester | M5121,M5122,M5123,M5124,M5124L,M5124XL,M5125,M5126<br>M5221,M5222,M5223,M5224,M5224L,M5224XL,M5225,M5226<br>M5133,M5134,M5134L,M5135,M5233,M5234,M5234L,M5235             |
|                           | Enkelt/ Dobbelt,<br>Bomuld    | M5141,M5142,M5143,M5144,M5145,M5146<br>M5241,M5242,M5243,M5244,M5245,M5246                                                                                                |
| Genanvendelig,<br>Poseløs | Enkelt                        | M5301,M5302,M5303,M5304,M5304L,M5305,M5306                                                                                                                                |
|                           | Dobbelt                       | M5401,M5402,M5403,M5404,M5404L,M5405,M5406                                                                                                                                |
| Engangsbrug               | Enkelt/ Dobbelt               | M5541-1#,M5541-2#,M5541-3#,M5541-4#,M5541-5#,M5542,M5543,M5544,<br>M5641-1#,M5641-2#,M5641-3#,M5641-4#,M5641-5#,M5642,M5643,M5644,<br>M5545,M5546,M5547,M5645,M5646,M5647 |

## Brugsanvisning:

- Vælg den korrekte manchet størrelse baseret på omkredsen af patientens arm eller lår.
- Se figuren nedenfor, for at anvende den rigtige side "This side to patient" af manchetten mod patientens arm eller lår samt at Symbolet "↓" eller "Φ" på manchetten er over den brachiale eller femorale arterie; læg manchetten omkring armen eller låret.



- Tilslut manchetten til NIBP-luftslangen.

**Udløbsdato:** Tre år for genanvendelig NIBP-manchet. To år for engangs NIBP-manchet (en patient)

## Rengøring og desinfektion (kun til genanvendelig NIBP-manchet):

For at rengøre kan man tørre manchetten af med en fugtig klud med mild sæbevand.

Man kan desinficere manchetten med ultraviolet lys.

**Udskiftning af manchetten:** Udskift manchetten hvis den er beskadiget. Hvis monitoreren viser lækage, skal den også udskiftes.

**Opbevaringskrav:** Temperatur: -5°C-40°C Fugtighed: 0%-85% Atmosfærisk: 86 kPa-100 kPa

**Transport:** Kan bruge tilgængelige transportmidler. Under transporten bør man tage forbehold mod ekstrusion samt regn eller sne. Blandet forsendelse med giftige, skadelige og ætsende produkter er forbudt.

## Advarsel:

- Fejlagtig placering kan medføre unøjagtige målinger. Ved brug af én patient manchet; kassér efter brug og anvend ikke til andre patienter.
- Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med produkterne, skal den rapporteres til producenten og den kompetente myndighed, hvor brugeren er etableret.

**Advarsler:** Placer ikke manchetten på den legemesdel, der bruges til intravenøs infusion eller Spo2-måling.

**Kontraindikation:** Nej

**Om Symbol på manchetten eller etiketten**

|                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Se brugsanvisningen                           |  Producent                 |
|  Manchetterne indeholder ikke naturgummilatex. |  Unik enheds identifikator |
|  Enkel patient brug                            |  Genanvendelig             |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Medicinsk produkt                                                               |  Autoriseret repræsentant i Europa |
|  Manchetterne overholder kravene i MDR EU 2017/745 (Medicinsk Device-forordning) |                                                                                                                     |

 **MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

**Manufacturer: Xuzhou Maicuff Technology Co.,Ltd.**

Address:8#-2-1106 Jinxiujiayuan,Jianguo West Road, 221006 Xuzhou City, Jiangsu Province,P.R.CHINA

Tel: 0086-516-85908810

Fax:0086-516-85908830

<http://www.maicuff.com>

E-mail:info@maicuff.com