

Dysis quick guide.

Tænd Dysis kolposkopet. Lys i grøn lampe ved foden af kolposkopet.

Indtast brugernavn og adgangskode.

Tryk "Ny patient" og udfyld min. 4 punkter (påkrævet)

Fornavn
Efternavn
Patient ID (CPR)
Fødselsdag

Og tryk "GEM"

For-fyld nu sprøjten med eddike, placer speculum og monter kameraet på speculum.

Try Dysis undersøgelse. Øverst i højre hjørne af skærmen.

Juster lysstyrken. Højre side af skærmen (+ og – knapperne)

Zoom ind i billedet med fingrene og skarp indstil billedet (+ og – knapperne)
Når billedet er skarpt, zoom ud igen.

Tryk "Start Dysis-tilstand". Nederst i højre side af skærmen.

Lysstyrken og fokus er nu låst. Tryk på sprøjten.

Dysis går i gang. Når baren nederst i højre side af skærmen bliver grøn, har Dysis nok materiale til at genererer en Dysis Map.

I kan anvende filtrene under kolposkopien uden problem.

Husk at indtaste første og anden prognose.

Det er muligt at markerer evt. biopsier før og efter at Dysis Map er genereret