

Finesse guide

Funktioner på frontpanelet

Røgudsugningssystem

Røgudsugningssystemet aktiveres automatisk ved aktivering af cut- eller coag og fortsætter med at køre indtil 5 sekunder efter deaktivering.

Røgudsugningsmontering

Finesse Filter Pack.

Filteret tilsluttes via friktionspasning, men må ikke tvinges med overdreven kraft.

Finesse Filter Pack

Slangen for enden af filterpakken fastgøres direkte til den permanente røgudsugningsstuds, som er integreret i de fleste vaginale specula (DSE-slange kan være påkrævet til andre specula). Spekulumslangen og reduktionsstykket er designet til engangsbrug og bør udskiftes efter hver procedure.

Filterpakken er klassificeret op til 15 procedurer. Filterets levetid spores manuelt ved at markere eller datere felter i 3x5-matricen på filterpatronen.

Internt filter

Finesse II+-systemet indeholder et internt filterelement, som bør udskiftes årligt

Elektrokirurgisk generatormodul

Hovedafbryder

Når Finesse II+-systemets strøm er tændt, lyser den grønne afbryderknap.



Indikator og ikon for cut-tilstand

Udgangen for cut-tilstand på Finesse II+ er forudindstillet til 65 watt og er en Blend 1-bølgeform. Denne indstilling er ideel til alle loop-størrelser, baseret på Finesse II+'s Controlled Output Circuitry+, som selvjusterer udgangen for at give et rent og ikke brændt præparat. Se *Finesse II+ Operator's Manual* for yderligere oplysninger om Controlled Output Circuitry+.



Indikator og ikon for coag-tilstand

Coag-tilstanden på Finesse II+ er forudindstillet til 60 watt.



Tilslutning af el-kirurgisk håndtag

Et standard el-kirurgisk håndtag med tre ben, to knapper eller vippekontakt indsættes her. Hvis der anvendes et håndtag med ét ben sammen med en pedal, skal pennen altid indsættes i Active Port (aktiv port), markeret med 'A'-symbolet.



Tilslutning af neutral plade

Der er en tilslutning til standard eller monitorerende neutrale plader. Det standardplade ikon, der er længst til højre, lyser som standard. Hvis en split-plade er tilsluttet, og den er korrekt klæbet fast på patienten, vil split-pladeikonet længst til venstre lyse.



Ved LETZ-proceduren placeres neutral-pladen typisk på patientens øvre lår, på det ben, der er tættest på Finesse II+-systemet. Pladen bør placeres med ledningssiden vendt mod Finesse II+-systemet.

Fejlindikatorer

Hvis der opstår fejltilstande, lyser et eller flere af disse ikoner, og der høres en alarm. Se *Finesse II+ Operator's Manual* for detaljer og trin til afhjælpning af fejltilstande.



Funktioner på bagpanelet

Drejeknap til lydstyrkejustering

Lydstyrken for de hørbare toner kan justeres. Lydstyrken bør justeres, så de hørbare toner tydeligt kan høres over røgudsugningsmotoren. Bemærk, at fejlindikatortonerne ikke kan justeres og ikke påvirkes af denne betjening.

Tilslutning til pedal

En pedal med to pedaler fås fra UTMD. Der er separate pedaler til cut- og coag-betjening.

Hovedsikringer og sikring til vakuummotor

Se *Finesse II+ Operator's Manual* for oplysninger om sikringer.

UtahLoop®-elektroder

UtahLoop-elektroden med den eksklusive Safe-T-Gauge® er designet til at begrænse den maksimale excisionsdybde og bevare sundt cervikalt væv.

Safe-T-Gauge- og 'Y'-designet hjælper med at understøtte den fine loop-tråd for at eliminere afbøjning af loop-tråden, som kan forårsage overfladisk excision

UtahLoop *Instructions for Use* er inkluderet med elektroderne og beskriver klargøring og brug af Safe-T-Gauge.

Alle UTMD-elektroder bør indsættes helt i det. Sørg for, at der ikke er noget uisoleret elektrodeskaft synligt.



Hurtig reference til genbestilling

* angiver, at Safe-T-Gauge® medfølger.

Fremhævnng angiver de mest populære elektroder.

Loop-elektroder

DLP-E11	25*22mm UtahLoop (lysegul)*
DLP-B11	25*8mm UtahLoop (beige)*
DLP-L11	20*15mm UtahLoop (blå)*
DLP-W11	20*12mm UtahLoop (hvid)*
DLP-M11	15*12mm UtahLoop (grøn)*
DLP-S11	10*10mm UtahLoop (gul)*
DLP-SQ1	10*10mm firkantet UtahLoop (orange)*
DLP-T11	5*5mm UtahLoop (lilla)

Kugleelektroder

DBL-511	5 mm UtahBall-elektrode (rød)
DBL-311	3 mm UtahBall-elektrode (sort)

Konisationselektroder

DCE-110	Large C-LETZ (blå)
DCE-115	Medium C-LETZ (grøn)
DCE-120	Ektocervikal C-LETZ (beige)
DCE-125	Small C-LETZ (gul)

Forlængerelektrode

DLP-S06	DXTender® Extender, lille (blå)
DLP-L09	DXTender Extender, stor (blå)
DLP-X10	11 cm extender (blå)

Tilbehør

ESU-305	El-kirurgisk håndtag med to knapper
ESU-420	Neutral plade, CQM, med påmonteret ledning
ESU-501	Finesse Filter Pack
ESU-502	Spekulumslange og reduktionsstykke
SSE-500	Finesse Internal Filter
ESU-170	Finesse+-pedal med to pedaler

For fuldstændige oplysninger om andre specialiserede elektrokirurgiske og gynækologiske produkter bedes du kontakte:



Utah Medical Products, Inc.
7043 South 300 West
Midvale, Utah 84047
USA
800 533 4984 • +801 566 1200
58302 rev 062122

Utah Medical Products Ltd.
Athlone Business & Technology Park
Athlone, Co. Westmeath N37 XK74
Irland
+353 90 647 3932
www.utahmed.com

Femcare Ltd.
32 Premier Way
Romsey, Hampshire SO51 9DQ
UK
+44 1794 525 10