


M/L-10

MULTI-FIRE CLIP APPLIER

Instruktioner


Indsætning og udtagning:

1. Hold på den røde tap på clipsemagasinet som muligt for at forhindre forskydning af clipsene.
2. Tryk håndtaget helt ind, mens clipsemagasinet føres ind i den proksimale ende af clipsetangen.
3. Ved indsætning af clipsemagasinet, skal pilen på clipsetangen og pilen på clipsemagasinet mødes.
4. Sørg for at clipsemagasinet bliver ført helt i bund, ved at give den røde flap et ekstra tryk med håndfladen eller tommelfingeren. Slip derefter håndtaget. En clips er nu placeret i kæberne.
5. Kontrollere at kæberne er i korrekt position og at håndtagsmekanismen fungerer korrekt. Lav en clips-test i fx en serviet med en til to clips. Se IFU'en for nærmere oplysninger.
6. Ved placering af clipsen og for at clipsen lukker helt skal håndtaget trykkes helt i bund, hvorefter håndtaget slippes. Ved udførelse af kolangiografi trykkes der til det syvende klik for delvis lukning af clipsen.
7. Tryk håndtaget helt i bund, og fjern clipsemagasinet efter brug.

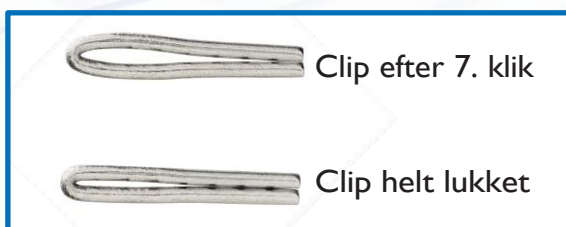

Demontering:

1. Tryk håndtaget helt i bund. Hvis alle clips ikke er blevet brugt, peg den distale ende nedad, så den sidste clips i kæberne lander på operationsbordet. Alternativt, clips den sidste clips fast i fx en serviet. Fjern og kassere clipsemagasinet mens du stadig holder håndtaget i bund.
2. Tryk håndtaget helt i bund. Fjern ydrerøret ved at skrue med uret på ydrerørets knop. Hold alternativt en finger på roteringsmekanismen på håndtaget.

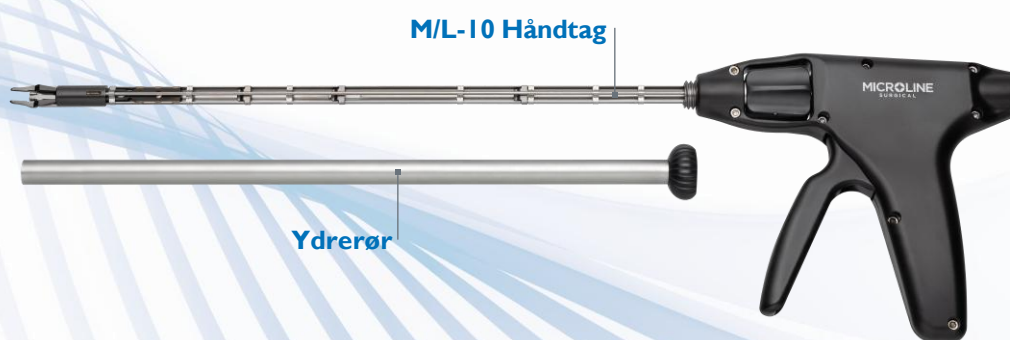

HUSK:

- Tving aldrig et clipsemagasin ind i håndtaget, når det føres ind.
- Den distale ende må ikke pege opad, når man affyrer en clips uden at klippe clipsen fast i noget, da denne clips kan falde tilbage ind i håndtaget og blokere det.
- Anvend et vandopløseligt smøremiddel før hver sterilisering.

Inspektion:

- Kontrollere at kæberne ikke er skæve eller beskadiget. Hvis kæberne er beskadig, må håndtaget ikke anvendes.
- Brug roteringsknoppen til at rotere ydrerøret for at kontrollere om der forekommer en metallisk lyd. Hvis der forekommer sådan en lyd, må håndtaget ikke anvendes.
- Tryk håndtaget ind og slip igen 20 gange for at kontrollere for binding eller tegn på beskadigelse. Hvis den binder eller der er tegn på beskadigelse, må håndtaget ikke anvendes.
- Kontrollér kæberne for skævhed, beskadigelse og belægninger af biologisk materiale. Kontrollér, at skaftet er lige. Fjern ydrerøret, og kontrollér inderskaftet for beskadigelse og belægninger af biologisk materiale.

MICROLINE
SURGICAL

50 Dunham Road | Beverly, MA 01915 USA
Phone 978-922-9810 | Fax 978-922-9209 | www.microlinesurgical.com

Microline B.V., Fortranweg 5 | 3821BK | Amersfoort, The Netherlands
Phone +31 (0) 33 76 000 11 | Fax +31 (0) 33 76 000 14 | www.microlinesurgical.com

© 2015 Microline Surgical. Microline is a trademark and/or registered trademark of Microline Surgical.
M/L-10 is a trademark and/or registered trademark of Microline Surgical.
P/N: 09-39-00144-00-INT Rev B, 7/15

Important information: Prior to use, refer to Instructions for Use supplied with this device for indications, contraindications, adverse events, suggested procedures, warnings and precautions for full product information.